



# Návod k použití chytré ponožky Smart Sock od Owlet

Návod na používanie inteligentnej ponožky Smart Sock od Owlet

CZ | SK



CZ

## Pro jaký výrobek je tento návod k použití určen?

Chytrá ponožka Smart Sock 3

Chytrá ponožka Smart Sock Plus

## Co naleznete v balení

Ponožky velikosti 1, 2 a 3, pro každou velikost ponožka na pravou i levou nožičku

Senzor chytré ponožky Smart Sock

Základna


Kabel základny

Napájecí adaptér

Úvodní příručka

\* Ponožky velikosti 3 jsou pouze v balení Smart Sock Plus.

## Jak chytrá ponožka Smart Sock od Owlet funguje?

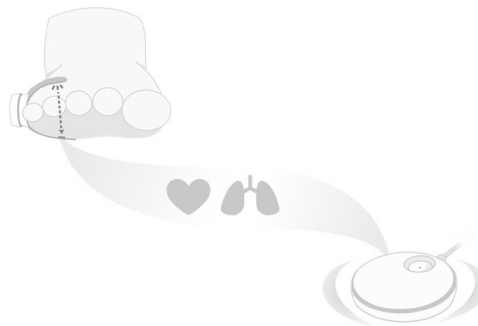

Senzor chytré ponožky Smart Sock využívá pulzní oxymetrii k získávání dat z nožičky vašeho spícího miminka. Světélko ponožky svítí přes kůži a průtok krve a hladiny kyslíku jsou odhadovány na základě toho, kolik světla zachytí senzor.

Senzor chytré ponožky Smart Sock sbírá data a odesílá je do základny. Na základě těchto dat vás základna v případě potřeby upozorní. Základna má za úkol vás v případě červeného alarmu včas upozornit, a proto ji doporučujeme umístit tak, abyste ji mohli vždy zaslechnout.


## Jak funguje aplikace

### **Pokud je chytrá ponožka Smart Sock připojena k Wi-Fi síti:**

Základna prostřednictvím Wi-Fi síť odesílá informace na cloud Owlet. Cloud Owlet tyto údaje umožňuje zobrazit v aplikaci Owlet. Díky tomu si můžete veškeré údaje prohlížet v reálném čase a dostávat oznámení z aplikace, ať už jste kdekoli.

### **Režim LAN (lokální síť):**

Chcete-li používat režim LAN, musí být telefon připojen ke stejné Wi-Fi síti jako základna. Aplikace pomocí Wi-Fi síť naváže počáteční spojení s cloudem Owlet a bude přijímat data, dokud aplikaci nezavřete a dokud nedojde ke změně Wi-Fi síť aplikace nebo základny.

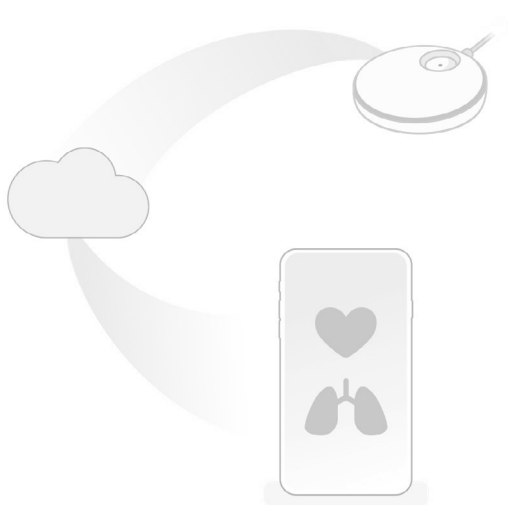



# Jak nastavit a používat chytrou ponožku Smart Sock od Owlet

## Požadavky

Chytrá ponožka Smart Sock od Owlet vyžaduje přístup k iOS nebo Android zařízení, na kterém je nainstalovaná aplikace Owlet Care. Informace o minimálních verzích operačních systémů naleznete v obchodě s aplikacemi.

Chytrá ponožka Smart Sock Plus je vhodná pro děti s maximální hmotností 24,9 kg (55 lbs).

Čtení naměřených hodnot v reálném čase, vzdálený přístup k aplikaci a některé funkce aplikace vyžadují připojení k bezdrátové 2,4GHz síti. Hotspot Wi-Fi sítě a 5GHz síť nejsou podporovány.

## Chcete-li nastavit chytrou ponožku Smart Sock od Owlet:

① Stáhněte si aplikaci Owlet.

Aplikace je dostupná pro zařízení iOS i Android.



<

Dobrý den! Pojdme založit účet.

E-mail

Heslo (minimálně 6 znaků)

Znovu zadejte heslo

② Založte si účet

Chcete-li si založit účet, postupujte podle pokynů aplikace.



Kdo jste?

Jméno

Příjmení

Telefonní číslo

Datum narození

PSC



Právě vám byl zaslán e-mail  
s potvrzovacím kódem.

Znovu zaslat e-mail.



Váš účet byl potvrzen. Vítejte  
v rodině Owlet.

Domů >

Přidat profil miminka nebo zařízení

Začínáme



Více informací o chytré ponožce Smart Sock od Owlet >



Máte zařízení Owlet, které si přejete nastavit?

Chytrá ponožka Smart Sock 3

Ne >

Ano >

Jaká zařízení si přejete nastavit



Chytrá ponožka Smart Sock 3 >



Chytrá ponožka Smart Sock 2 >




Kamera >

③ Nastavte zařízení

POZNÁMKA: Pokud již máte účet Owlet a přidáváte další zařízení Owlet, postupujte podle pokynů aplikace a přidejte nové zařízení.




④ Připojte základnu ke zdroji napájení a chytrou ponožku Smart Sock k základně.

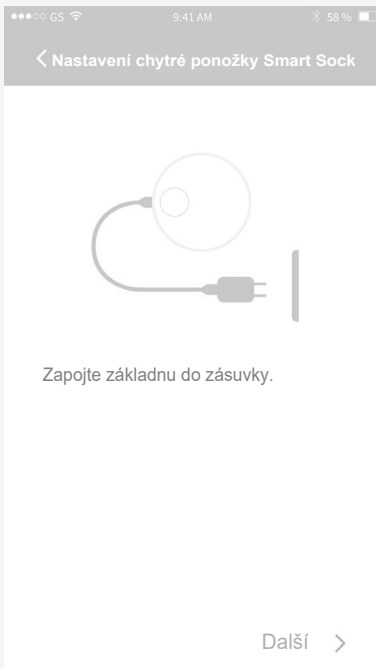


Pojďme vaši základnu připojit k Wi-Fi síti, abyste si mohli zobrazit údaje v telefonu.

1. Přejděte do nastavení Wi-Fi sítě ve vašem telefonu a vyberte síť „Owlet“.

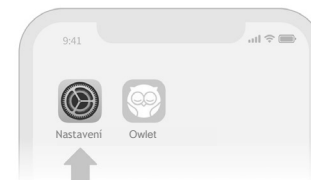

2. Vraťte se do aplikace Owlet.

*Pokud budete přeměrování nebo se zobrazí zpráva „Přesměrování se nezdařilo“, je to v pořádku! Stačí se vrátit do aplikace Owlet.*

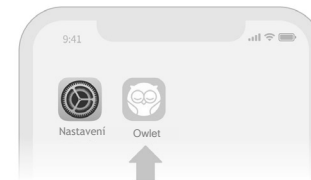

(Tato obrazovka platí pouze pro iOS zařízení.)



Váš účet byl potvrzen.  
Vítejte v rodině Owlet!

Domů >

(Tato obrazovka platí pouze pro zařízení Android.)

#### Nastavení Wi-Fi sítě

Zvolte zařízení Owlet, které si přejete nastavit.

Owlet - 383G9f65

(Tato obrazovka platí pouze pro zařízení Android.)

9:41 AM 58%

#### Nastavení Wi-Fi sítě

Zvolte router Wi-Fi sítě.

(Zatím není kompatibilní s 5,0GHz sítěmi.)


Wi-Fi síť Johnsonových


Wi-Fi síť vašeho souseda  
s divným názvem



Jurský dům

Petersonovi

Podle pokynů aplikace můžete připojit chytrou ponožku Smart Sock k Wi-Fi síti, zaregistrovat a spárovat ponožku a v případě potřeby ponožku aktualizovat.

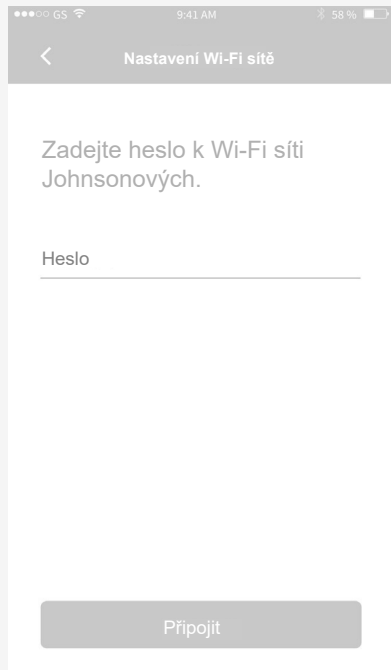

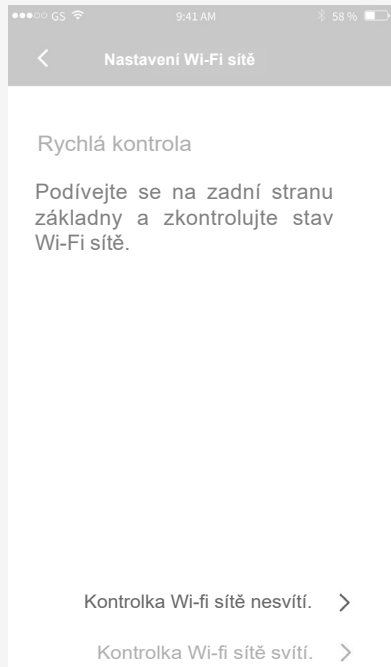


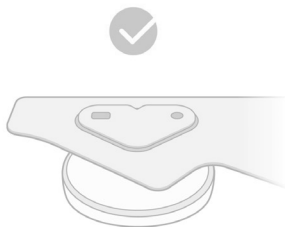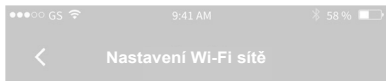

Chytrá ponožka Smart Sock  
byla úspěšně spárována!

Vaše základna by měla bíle blikat,  
což znamená, že se chytrá ponožka  
Smart Sock nabíjí.

Dále se ujistíme, že je vaše zařízení  
aktualizováno.

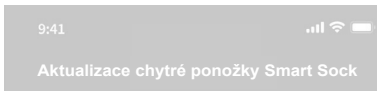

## Aktualizace chytré ponožky Smart Sock 3

Během aktualizace neodpojujte  
základnu od napájení.



Už to bude...



## Důležité bezpečnostní pokyny

Správné nasazení chytré ponožky Smart  
Sock

Bezpečnost vašeho miminka je pro nás na prvním místě  
a víme, že i pro vás.

Uvědomte si prosím, že nesprávně nasazená ponožka  
může být pro vaše miminko nepohodlná a na nožičce se  
mohou objevit zarudlé skvrny, otoky nebo puchýře.  
Udržujte nožičku vašeho miminka v suchu, používejte  
správnou velikost ponožky a dodržujte naše pokyny  
pro její správné nasazení.

Péče o chytrou ponožku Smart Sock


Chytrou ponožku Smart Sock a senzor alespoň jednou  
za týden vyperte v ruce v jemném pracím prostředku.  
Před dalším použitím nechte ponožku zcela uschnout.

Zásady bezpečného spánku


Nezapomeňte vždy dodržovat zásady bezpečného  
spánku a vyhýbat se nebezpečným plochám pro spaní  
(včetně houpaček, autosedaček a spaní ve společné posteli).

Chytrá ponožka Smart Sock od Owllet nenahrazuje  
bezpečný spánek a rodičovskou péči. Ujistěte se, že  
dodržujete zásady bezpečného spánku a používáte chytrou  
ponožku Smart Sock od Owllet jako pomůcku, která vám  
kromě veškeré péče, bezpečí a lásky, které se vašemu  
miminku dostává, pomůže zjistit, jak se mu daří.



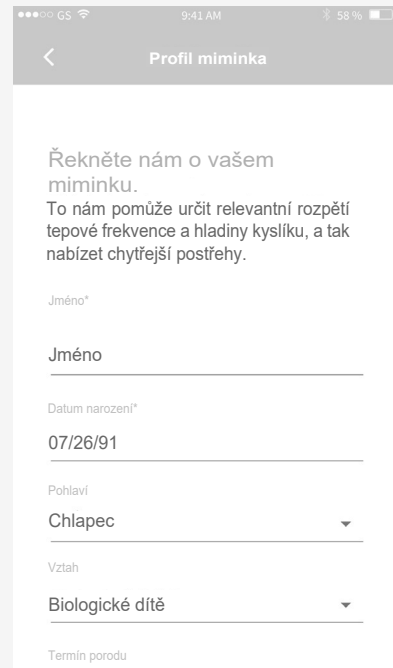

- ⑤ Vytvořte profil vašeho miminka. Aplikace vám pomůže vytvořit profil vašeho miminka a přiřadit jej k zařízení Owlet.

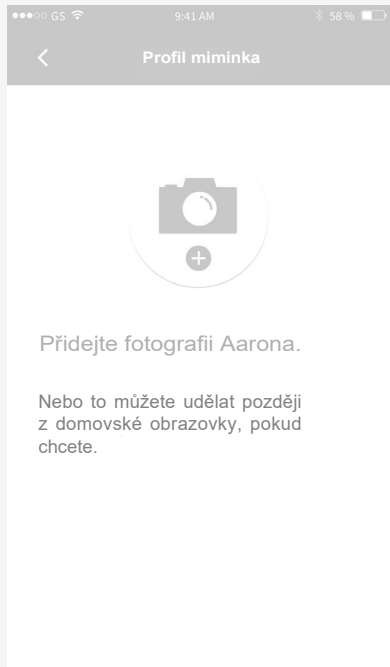


## Správná velikost chytré ponožky Smart Sock a její nasazení

Chytrá ponožka Smart Sock je dostupná ve dvou velikostech a pro každou velikost je k dispozici ponožka na pravou i levou nožičku:

Velikost 1 je vhodná pro miminka o hmotnosti do 5,4 kg (12 lbs).

Velikost 2 je vhodná pro miminka o hmotnosti mezi 5,4-13,5 kg (12-30 lbs).

Velikost 3 je vhodná pro děti o hmotnosti 13,5-24,9 kg (30-55 lbs).\*

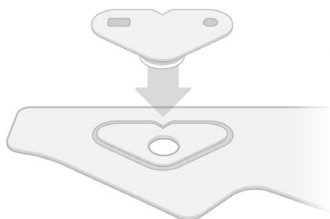

*\*Ponožky velikosti 3 jsou pouze v balení chytré ponožky Smart Sock Plus.*



### Připevněte senzor k látkové ponožce

Zarovnejte obrys senzoru s linií na látce, přitiskněte senzor k ponožce, aby se připevnil, a zacvakněte jej na místo.

### TIP:

Pokud si nejste jistí vhodnou velikostí, začněte s menší ponožkou.



### Nasaďte ponožku

Přiložte ponožku ke straně nožičky tak, aby se senzor nacházel za malíčkem.

Zajistěte pásek pod prsty nohou, následně omotejte pásek kotníku kolem



zadní části kotníku a zajistěte jej na nártu.

Při správném umístění by měl pásek na nártu směřovat k palci a senzor by se měl nacházet na malíkové hraně nožičky miminka tak, aby hlava sovičky směřovala k prstům.



### TIPY PRO POUŽITÍ CHYTRÉ PONOŽKY SMART SOCK 3 NA NOŽIČKÁCH BATOLAT A DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU:

Batolata a děti předškolního věku jsou mnohem pohyblivější a aktivnější než kojenci, a proto bychom se s vámi rádi podělili o několik užitečných rad:

1. Chytrou ponožku Smart Sock nasadíte až poté, co dítě uložíte do postele, aby v ní co nejméně chodilo. Chůze s nasazenou ponožkou může poškodit senzor.
2. Počkejte, až dítě usne, a až poté zapněte základnu. Tím zamezíte žlutým alarmům, které by vás zbytečně upozorňovaly na převalování dítěte při usínání. Základnu můžete zapnout prostřednictvím aplikace nebo přímo na jednotce.
3. Pokud vaše dítě chytrou ponožku Smart Sock nikdy předtím nenosilo, může váhat a klást vám otázky. Dovolte mu, aby si předtím, než mu ponožku nasadíte, zařízení prohlédlo a zvyklo si na něj.

## Získávání údajů a alarmy

Předtím, než si vaše dítě půjde zdřímnout nebo spát, vyjměte chytrou ponožku Smart Sock ze základny a nasadte mu ji.

Světla základny začnou zeleně blikat, což znamená, že se zařízení pokouší snímat hodnoty. Jakmile začne základna získávat dané údaje, bude zeleně pulzovat.

### **Žlutý alarm**

Během žlutého alarmu bude základna stanice žlutě blikat, hrát ukolébavku a aplikace vám zašle push oznámení. Žlutá barva signalizuje, že je ponožka špatně nasazená nebo spadla z nožičky dítěte a zařízení nebylo schopno po dobu minimálně 60 sekund získat dobré údaje.

### **Modrý alarm**

Během modrého alarmu bude základna stanice modře blikat, hrát ukolébavku a aplikace vám zašle push oznámení. Modrá barva signalizuje, že se ponožka nachází po dobu minimálně 60 sekund mimo dosah základny, upozorňuje na vybitou baterii nebo blokování signálu.

Lidské tělo může rušit signál mezi základnou a ponožkou. Když dítě chováte, neotáčejte se k základně zády, abyste předešli zbytečným oznámením. Pokud se modrý alarm spouští opakovaně, posuňte ponožku a základnu blíže k sobě, abyste předešli opakovaným oznámením.

### **Červený alarm**

Červená barva signalizuje oznámení té nejvyšší priority. Základna má k dispozici tři druhy červených oznámení, při kterých bliká červeně a vydává vysoký zvuk.

**Nízká hladina kyslíku:** Upozorní vás, pokud hladina kyslíku dítěte klesne pod 80 %.

**Nízká tepová frekvence:** Upozorní vás, pokud tepová frekvence dítěte klesne pod 60 tepů za minutu a hladina kyslíku klesne pod 85 %.

**Vysoká tepová frekvence:** Upozorní vás, pokud tepová frekvence dítěte překročí 220 tepů za minutu.

### **TIP:**

Pokud má dítě nasazenou ponožku během krmení, může se stát, že spustí červený alarm, jelikož při jídle přirozeně klesá obsah kyslíku a zvyšuje se tepová frekvence.

### **Pozastavení zvuku alarmu**

Zvuk jakéhokoli aktivního alarmu můžete krátkým stisknutím tlačítka základny nebo prostřednictvím aplikace na 60 sekund pozastavit.

Pozastavení pozastaví zvuk základny a aplikace – světlý kroužek bude na základně nadále svítit a podrobnosti budou k dispozici v aplikaci. Alarm zůstane aktivní, dokud se stav nevyřeší. Pokud spouštěč (nízká hladina kyslíku, nízká nebo vysoká srdeční frekvence) během pozastavení ustane, alarm se zastaví.

Pokud během pozastavení dojde ke spuštění nového alarmu se stejnou nebo vyšší prioritou, tento alarm se spustí bez ohledu na pozastavení.

### **Základna**

Základna chytré ponožky Smart Sock pomocí následujících barevných světel signalizuje různé provozní stavy:

**Postupně bliká zeleně:** Získávání údajů

**Pulzuje zeleně:** Hodnoty jsou v normě.

**Bliká modře:** Chytrá ponožka Smart Sock je mimo dosah základny, baterie je vybitá nebo něco blokuje signál.

**Bliká žlutě:** Chytrá ponožka Smart Sock není správně nasazená nebo spadla z nožičky.

**Bliká červeně:** Tepová frekvence nebo hladiny kyslíku jsou mimo stanovený rozsah.

**Pulzuje bíle:** Chytrá ponožka Smart Sock se nabíjí.

**Svítil bíle:** Chytrá ponožka Smart Sock je plně nabitá.

**Postupně bliká bíle:** Chytrá ponožka Smart Sock není spárována.

### **Jak zapnu monitorování a základnu?**

Pokud se senzor nabíjí, vyjměte jej z nabíjecího portu, nebo stlačte základnu a uvolněte ji. Po stlačení základny uslyšíte pípnutí a základna se rozsvítí zeleně.

### **Jak základnu a monitorování vypnu?**

Stlačte základnu a podržte ji, dokud nezhasne zelené světlo a neuslyšíte pípnutí.

## Nabíjení chytré ponožky Smart Sock

Položte chytrou ponožku Smart Sock na nabíjecí port, který se nachází na horní straně základny a ujistěte se, že světlo základny svítí bíle.

### Úroveň nabití chytré ponožky Smart Sock



Úroveň nabití baterie chytré ponožky Smart Sock můžete zkontrolovat v aplikaci.

Pokud světlo základny pulzuje bíle, ponožka se nabíjí. Pokud svítí bíle, ponožka je plně nabitá.

## Upozornění na slabou baterii chytré ponožky Smart Sock

Pokud aplikace zjistí, že baterie chytré ponožky Smart Sock se za méně než hodinu vybitje, upozorní vás na to modrým alarmem. V tomto případě však základna nebude vydávat žádný zvuk ani blikat.

Stav baterie můžete rovněž kdykoli zobrazit na stavové obrazovce zařízení.


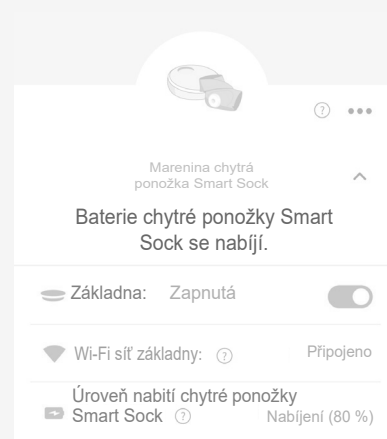
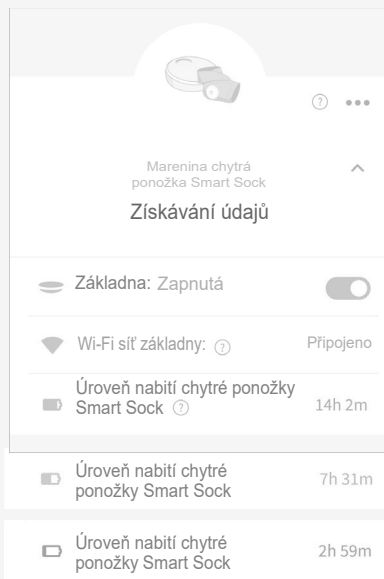


## Historie

Na kartě Historie v aplikaci se zobrazují poslední relace spánku, údaje a alamy. Základna a aplikace vyžadují k zobrazení Historie připojení k Wi-Fi síti.

Grafy zobrazují průměrné hodnoty tepové frekvence, kyslíku a spánku za uplynulých 10 minut a aktualizují se každých 10 minut během každého spánku.

Stažením grafů dolů obnovíte data, nebo zavřete a znovu otevřete aplikaci. Historie uchovává údaje o posledních 30 relacích spánku.

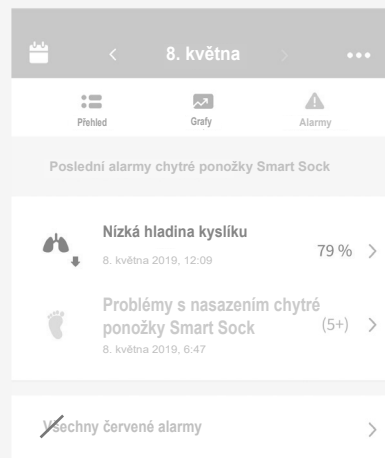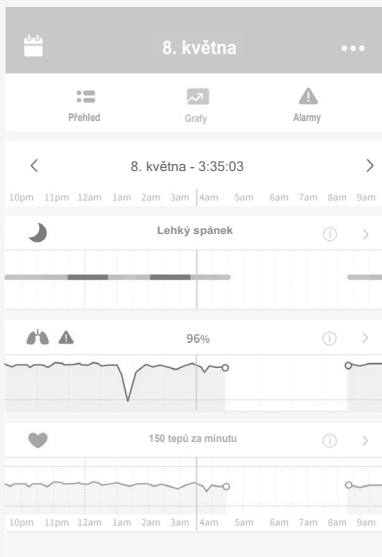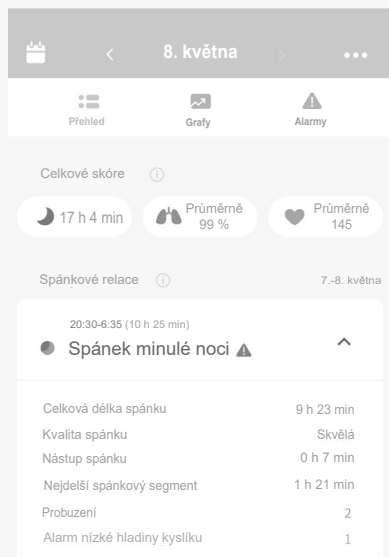



## Po probuzení

Jakmile dítěti chytrou ponožku Smart Sock sundáte, vraťte ji do základny, aby se mohla nabíjet.

### Péče a uskladnění

Druhou chytrou ponožku Smart Sock velikosti, kterou právě používáte, uchovávejte na snadno přístupném místě, abyste ponožky mohli pravidelně střídat na obou nožičkách. Druhou velikost uschovejte pro budoucí použití.

Společnost Owlet doporučuje prát ponožku a senzor minimálně jednou za dva týdny, aby se zabránilo podráždění pokožky způsobenému znečištěnou ponožkou a senzorem. Ponožku a senzor perte ručně v jemném pracím prostředku a studené vodě. Před dalším použitím je nechte zcela uschnout.

### Jak vypnout senzor chytré ponožky Smart Sock

Vyjměte senzor ze základny. Odpojte napájecí kabel od základny. Stiskněte a podržte tlačítko základny a současně zasuňte napájecí kabel. Držte tlačítko základny, dokud se světlo základny nerozsvítí oranžově a neuslyšíte čtyři pípnutí. Stiskněte tlačítko. Světlo v ponožce zhasne. Chcete-li ponožku opět zapnout, vložte senzor do nabíjecího portu základny.

## Tipy a triky

### **Nasazení chytré ponožky Smart Sock**

Nesprávně nasazená ponožka může být pro vaše dítě nepohodlná a na nožičce se mohou objevit zarudlé skvrny, otlaky nebo puchýře. Ujistěte se, že dítě nosí správnou velikost ponožky: je důležité, aby ponožka dobře seděla, ale nebyla těsná kolem prstů ani kotníku. Doporučujeme pravidelně střídat pravou a levou ponožku.

Pokud se na pokožce nožičky objeví zarudnutí, přestaňte na této nožičce ponožku používat a používejte ji na druhé nožičce, dokud zarudnutí zcela nezmiž.

### **Kam mám umístit základnu?**

Základna musí být umístěna v dosahu používané chytré ponožky Smart Sock, aby nedocházelo ke zbytečnému spouštění modrého alarmu. Dosah Bluetooth je až 30 m. Základna má za úkol vás v případě červeného alarmu včas upozornit, a proto ji doporučujeme umístit tak, abyste ji mohli vždy zaslechnout.

### **Jak otestovat alarmy**

#### **Červený alarm**

Vyjměte senzor ze základny a nechte zapnuté monitorování. Stiskněte a podržte základnu, dokud neuslyšíte tři pípnutí, a pak ji uvolněte. Chcete-li zvuk pozastavit, znovu stiskněte základnu nebo jej pozastavte v aplikaci. Chcete-li zařízení resetovat, stiskněte a podržte základnu, dokud světlo základny nezhasne a neuslyšíte pípnutí. Následným stisknutím základnu opět zapnete.

#### **Modrý alarm**

Vyjměte senzor ze základny a nechte zapnuté monitorování. Držte senzor a vzdalte se od základny.

#### **Žlutý alarm**

Vyjměte senzor ze základny a nechte zapnuté monitorování. Nasaďte chytrou ponožku Smart Sock na nožičku dítěte nebo prst dospělého, dokud zařízení nezíská údaj. Poté ponožku sejměte a chvíli počkejte. To může trvat až 60 sekund.


### **Jak zrušit připojení k Wi-Fi síti**

#### **Prostřednictvím základny**

Vyjměte senzor ze základny. Stiskněte a podržte tlačítko základny a současně do základny zasuněte napájecí kabel. Držte tlačítko základny, dokud se světlo základny nerozsvítí oranžově a neuslyšíte čtyři pípnutí. Poté třikrát stiskněte tlačítko základny. Zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi na spodní straně základny nesvítí.

### ***Máte doma neposedu?***

Snažíme se vaše dítě hlídat za každé situace, ale někdy sebou tolik vrtí, že senzor nedokáže získat potřebné údaje. V tomto případě se v aplikaci zobrazí kmitající nožičky. Pohyb má vliv na kvalitu získaných údajů, takže místo zbytečného upozornění se snímání a oznámení na chvíli pozastaví, dokud nebudou opět zjištěny kvalitní hodnoty.

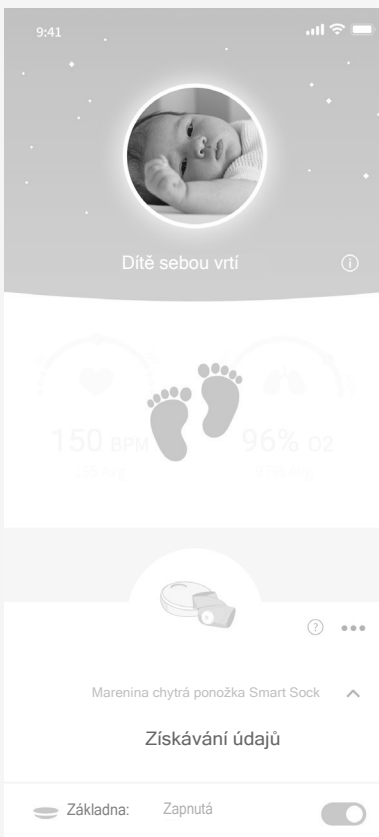


### ***Funguje chytrá ponožka Smart Sock i pod dětským oblečením?***

Chytrá ponožka Smart Sock je navržena tak, aby se pohodlně vešla pod pyžama, zavinovačky a ponožky, a zajistila tak dítěti ničím nerušený spánek.

### ***Sdílení přístupu k aplikaci***

Společnost Owlet pracuje na možnosti přidání více účtů pro sdílení přístupu k aplikaci. Chcete-li zatím aplikaci sdílet s přáteli nebo rodinou, stačí jim sdělit přihlašovací údaje k vašemu účtu.

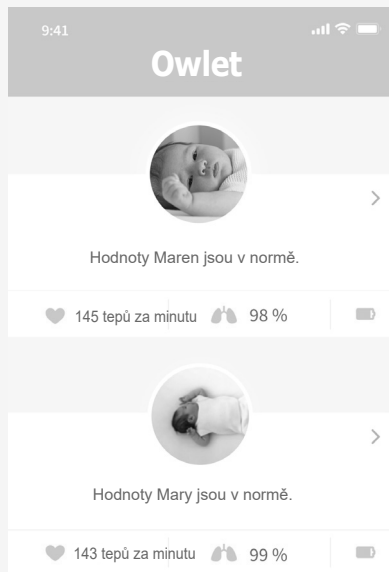

### ***Jas základny***

Základna je vybavena senzorem okolního světla a automaticky upravuje jas svého světla podle světla v místnosti.

### ***Centrum pro nápovědu a podporu***

V aplikaci přejděte do části Účet > Nápověda a podpora a kontaktujte náš tým zákaznického servisu prostřednictvím chatu v aplikaci, emailu a telefonu, nebo přejděte na stránku [www.owletcare.cz](http://www.owletcare.cz). Další tipy a triky najdete na kartě Průvodce v aplikaci.

### ***Uskladnění chytré ponožky Smart Sock***

Senzor chytré ponožky Smart Sock obsahuje baterii, která se po delší době vybije. Pokud se baterie zcela vybije, dojde k poškození senzoru.

*6 kroků, jak uložit senzor chytré ponožky Smart Sock:*

- 1. Plně nabijte senzor.**
- 2. Vyjměte senzor ze základny.**
- 3. Vypněte ponožku podle pokynů na straně 20.**
- 4. Odpojte základnu od napájení.**
- 5. Senzor, základnu, kabely, zástrčku a chytré ponožky Smart Sock uložte na chladné a suché místo.**
- 6. Každých 6 měsíců senzor dobijte a následně zopakujte kroky 1–5.**

### ***Více dětí? Žádný problém!***

Aplikace Owlet podporuje založení několika dětských profilů a umožňuje vám ke každému dítěti přiřadit libovolné zařízení. Dbejte na to, aby každé dítě mělo svou chytrou ponožku Smart Sock a příslušnou základnu, aby v případě alarmu nedošlo k záměně.



## Prohlášení o shodě

**Výrobce:** *Owlet Baby Care*  
2500 Executive PKWY  
Lehi, Utah 84043  
Telefon: 844.334.5330

**Výrobek:** Owlet Smart sock 3

**Číslo výrobku:**  
OBL 3.0, OSS 3.0 Owlet Sock 3rd Generation

**Popis výrobku:** Owlet Smart Sock 3 se skládá ze dvou součástí – základna ( OBL) a ponožka se senzorem ( OSS). Senzor používá přenos PPG k získání hodnot srdečního rytmu a hladiny kyslíku dítěte nasazením ponožky na nohu. Zařízení je napájeno nabíjecí Li-Ion baterií. Přenáší pohodu pulzní oxymetrie data do základny přes Bluetooth Low energy ( BLE). Využívá Nordic nRF52840 IC, které podporuje standardní BLE modifikace a komunikační techniky.

**Název zástupce:** Obelis S.A

### **Adresa registrovaného zástupce:**

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.  
Tel: 32 (0) 2 732 5954  
Fax: 32 (0) 2 732 60 03  
Email: mail@obelis.net  
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení Owlet Baby Care of Lehi, Utah, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
  - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
  - Council Directive 2011/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
  - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
  - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001)– General Product Safety
  - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

Tammy Lavery

*Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs*

## CZ Varování / Důležité bezpečnostní pokyny

### **VAROVÁNÍ: Chytrá ponožka Smart Sock od Owlet není zdravotnický prostředek.**

Není určena k použití jako zdravotnický prostředek nebo k nahrazení zdravotnického prostředku. Neslouží a není určena k diagnostice, léčení, ošetřování, zmírňování nebo předcházení jakýmkoli onemocněním nebo zdravotním stavům, ani k vyšetřování, nahrazování nebo úpravě anatomie nebo jakéhokoliv fyziologického procesu.

Chytrá ponožka Smart Sock od Owlet je určena pro zdravé děti do 18 měsíců věku a prahové hodnoty oznamování na chytré ponožce Smart Sock od Owlet nejsou tak přísné jako u lékařských monitorů.

*Mějte na paměti, že: Tento výrobek je určen pouze k tomu, aby vám pomáhal sledovat stav vašeho dítěte, a není určen k tomu, aby nahradil vaši péči o dítě. Jste zodpovědní za zdraví a dobré životní podmínky svého dítěte a dodržování zásad bezpečného spánku, zdraví a péče.*

- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock od Owlet jako diagnostický nástroj.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock od Owlet, pokud vám lékař doporučí použití nemocničního pulzního oxymetru nebo nemocničního monitoru zástavy dechu.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock od Owlet jako výmluvu pro nebezpečné spánkové návyky.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock od Owlet jako náhradu nebo místo péče dospělé osoby o dítě.

### Záruka

Společnost Owlet si za svými výrobky hrdě stojí. Naše záruky naleznete na webové stránce: [www.owletcare.cz](http://www.owletcare.cz)

### Obchodní podmínky

Používání výrobků společnosti Owlet podléhá podmínkám, které naleznete na webové stránce: [www.owletcare.cz](http://www.owletcare.cz). Používáním výrobku společnosti Owlet vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Kontaktní informace pro váš region naleznete na [www.owletcare.cz](http://www.owletcare.cz)

### Bezpečnost

Vaše bezpečnost i bezpečnost jiných osob je pro nás velmi důležitá. V tomto návodu a v aplikaci Owlet Baby Care naleznete mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a dodržujte je.

### PRO BEZPEČNOST VÁS A VAŠEHO DÍTĚTE:

KDYKOLI SE OZVE ALARM, OKAMŽITĚ ZAREAGUJTE.



**VAROVÁNÍ: ZÁKLADNU VŽDY UDRŽUJTE VE VZDÁLENOSTI ALESPŮN 1 METRU OD POSTÝLKY DÍTĚTE, JELIKOŽ KABEL MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ.**

CHYTRÁ PONOŽKA SMART SOCK OD OWLET JE POUZE POMŮCKOU. NENAHRAZUJE DOZOR DOSPĚLÉ OSOBY.

U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ, DĚTÍ NA PODPŮRNÉM KYSLIKU NEBO DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZKONZULTUJTE POUŽITÍ CHYTRÉ PONOŽKY SMART SOCK OD OWLET S VAŠÍM LÉKAŘEM.



Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodaný napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.

### IC: 21386-OBL3A (základna)

### IC: 21386-OSS3A (senzor)

Toto zařízení splňuje části 15 pravidel FCC a vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Společnost Owlet Baby Care prohlašuje, že chytrá ponožka Smart Sock od Owlet je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující webové stránce: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

2 402-2 480 MHz (výstupní výkon 63 mW)

Bluetooth základna

2 412-2 462 MHz (výstupní výkon 75 mW)

Wi-Fi síť základna

2 402-2 480 MHz (výstupní výkon 6,3 mW)

Bluetooth senzor



Společnost Owlet se zavázala plnit požadavky směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Více informací o správné likvidaci výrobků Owlet v rámci Evropské unie a ve Velké Británii naleznete na našich webových stránkách.

VSTUP: 100-240 V~0,2 A

50-60 Hz

VÝSTUP: 5 V ~ 1 A



800433

Splňuje požadavky normy UL 62368-1  
a CAN/CSA-C22.2  
č. 62368-1

Americký patent č. 9,693,730 a 10,449,837.  
Další patenty v řízení.




# Stručný popis chytré ponožky Smart Sock

Chytrá ponožka Smart Sock™ 3 od Owlet pomocí dvou senzorů monitoruje životní funkce vašeho miminka.




Velikost 1

Velikost 2

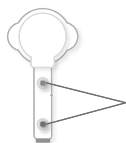

## Senzory chytré ponožky Smart Sock

Senzor snímá tepovou frekvenci a hladinu kyslíku vašeho miminka.

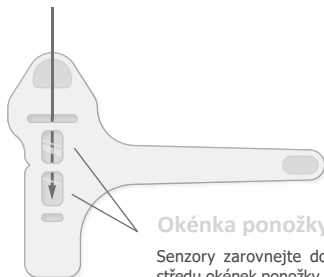

## Okénka ponožky

Senzory zarovnejte do středu okének ponožky.



## Padne na každou nožičku

Chytrou ponožku Smart Sock od Owlet lze nasadit na pravou i levou nožičku. Dbejte na to, aby byl obrys senzoru i senzor na vnější straně nožičky za malíčkem, jediné tak je ponožka správně nasazená a může získávat potřebné údaje.





## Pravá nožička

Chytrá ponožka je vyboulená na nártu.

## Levá nožička

Chytrá ponožka je vyboulená na chodidle.

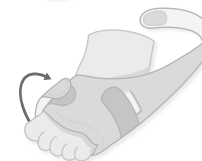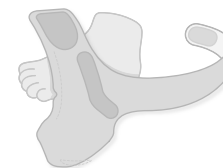

## Nasazení chytré ponožky Smart Sock

### Neutahujte chytrou ponožku příliš těsně.

Pokud pásek přesáhne suchý zip, vyzkoušejte menší velikost ponožky.



# Stručný popis základny

Stačí jediný pohled na základnu a zjistíte, jak se vašemu miminku daří

## Kontrolka chytré ponožky Smart Sock

Zelené světlo signalizuje, že je chytrá ponožka Smart Sock připojena k základně.

## Registrace

Při nastavování výrobu vás aplikace vyzve, abyste toto tlačítko jednou stiskli.

## Kontrolka Wi-Fi sítě

Zelené světlo signalizuje, že je základna připojena k Wi-Fi síti.

## Zapnutí/vypnutí


Chcete-li základnu vypnout, stiskněte ji a uvolněte. Základna zapírá a světlo zhasne.

## Stavové světlo

Světelný kroužek vás informuje o stavu vašeho miminka. Podrobnosti naleznete v aplikaci.

## Ztlumení světla

Stisknutím a podržením základny můžete přepínat mezi jasným denním režimem a tlumeným nočním režimem světla.

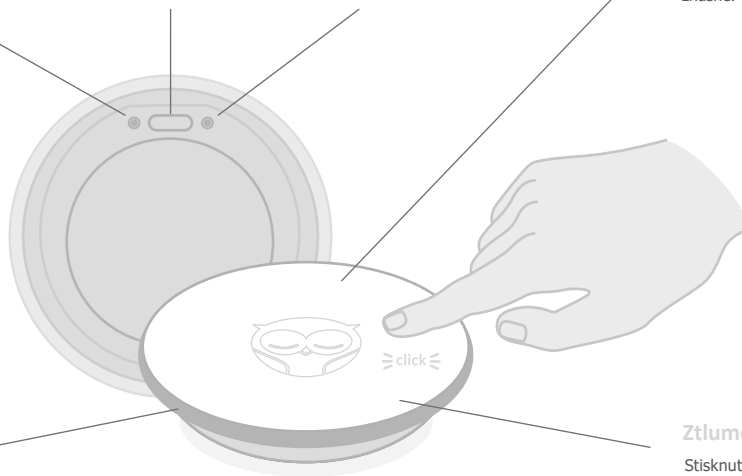

# Barvy světla základny


Základna se může rozsvítit pěti barvami, které indikují různé stavy, a vydávat zvuková upozornění. Chcete-li si poslechnout příklady, přejděte do aplikace.

## Stav




### Bliká zeleně

První měření hodnot tepové frekvence a hladiny kyslíku

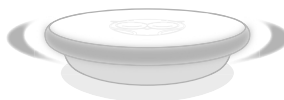

### Pomalou pulzuje zeleně

Tepová frekvence a hladina kyslíku jsou v normě.

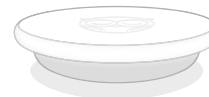

### Svítí bíle


Chytrá ponožka Smart Sock je připojená a nabíjí se.

## Alarmy




### Bliká červeně

Tepová frekvence nebo hladina kyslíku se pohybuje mimo stanovený rozsah.

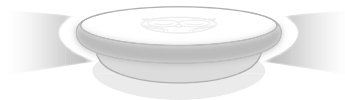

### Bliká modře

Chytrá ponožka Smart Sock je odpojená od základny.

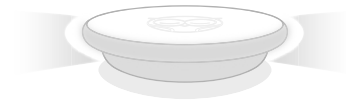

### Bliká žlutě

Chytrá ponožka Smart Sock spadla z nožičky, je špatně nasazená nebo posunutá.


# Začínáme

1

Pomocí MicroUSB konektoru připojte elektronickou součástku chytré ponožky Smart Sock k základně.

2

Zapojte základnu do zásuvky. Chytrá ponožka Smart Sock se začne nabíjet.

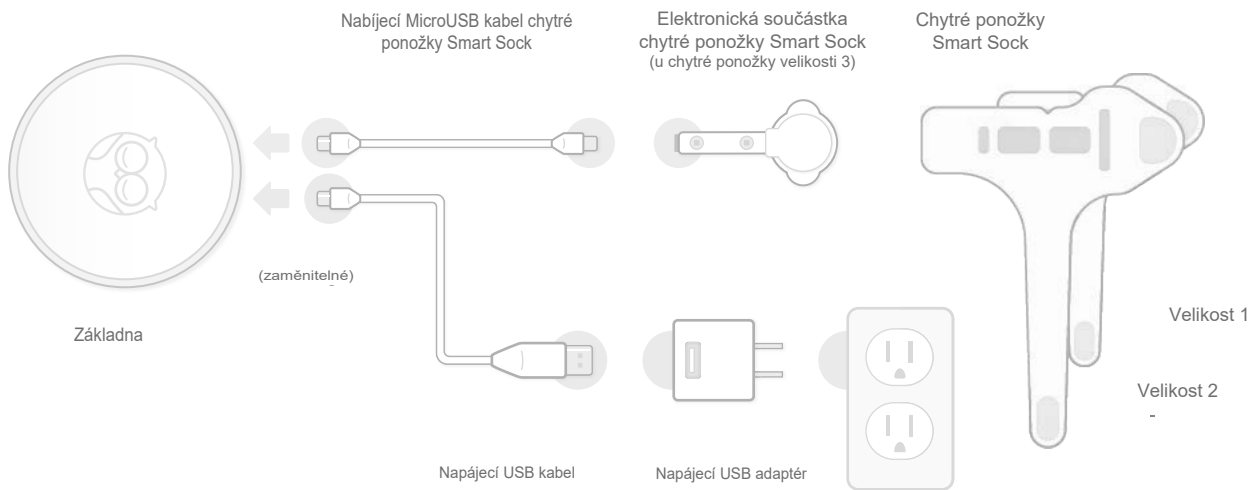


3

Stáhněte si aplikaci Owlet a nastavte vaši chytrou ponožku Smart Sock™ a základnu.

4

Díky čůvičce Owlet, která vám pomůže pohlídat vaše miminko, můžete opět klidně spát. Základnu používejte jako primární oznamovací systém a aplikaci jako sekundární.

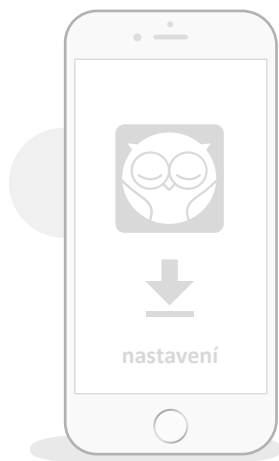

Aplikace Owlet



Základna

Chytrá ponožka  
Smart Sock 3

Aplikace Owlet

# Informace o záruce

Společnost Owlet poskytuje záruku chytré ponožky Smart Sock™ 3 při běžném používání a servisu bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu, který je uveden na dokladu o koupi.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Chytrá ponožka Smart Sock od Owlet a aplikace Owlet mají sloužit jako pomůcky při péči o dítě a nejsou určeny k tomu, aby nahradily nebo se používaly bez dohledu zodpovědné dospělé osoby.**

Chytrá ponožka Smart Sock 3 od Owlet je určena pro zdravé děti a prahové hodnoty pro spuštění alarmu na chytré ponožce Smart Sock 3 od Owlet proto nejsou tak přísné jako u lékařských monitorů.

Upozornění:

- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock 3 od Owlet jako diagnostický nástroj.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock 3 od Owlet, pokud vám lékař doporučí použití nemocničního putzního oxymetru.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock 3 od Owlet, pokud vám lékař doporučí použití nemocničního monitoru zástavy dechu.
- Nepoužívejte chytrou ponožku Smart Sock 3 od Owlet jako výmluvu pro nebezpečné spánkové návyky.

## PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD K POUŽITÍ

V návodu k použití naleznete mnoho užitečných rad, jak chytrou ponožku Smart Sock 3 od Owlet správně používat a udržovat. Řešení některých problémů naleznete v sekci Řešení problémů. Pokud si nejprve přečtete tipy pro řešení problémů, možná se na nás nebudete muset obracet s žádostí o pomoc. Kompletní informace o nastavení a používání výrobku naleznete na webové stránce [www.owletcare.cz](http://www.owletcare.cz).

## PŘEČTĚTE SI BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Vaše bezpečnost i bezpečnost jiných osob je pro nás velmi důležitá. V tomto návodu a v aplikaci Owlet Baby Care naleznete mnoho důležitých bezpečnostních pokynů. Vždy si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



**Tento symbol v tomto návodu k použití upozorňuje na důležité bezpečnostní informace!**

Všechny bezpečnostní informace budou následovány výstražným symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“, „POZOR“ nebo „UPOZORNĚNÍ“. Tato slova znamenají:

**NEBEZPEČÍ** = Bezprostředně hrozící nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.

**VAROVÁNÍ** = Potenciálně nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob a/nebo poškození majetku.

**POZOR** = Bezprostředně hrozící nebezpečná situace, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění osob.

**UPOZORNĚNÍ** = Nebezpečná situace, která by mohla vést k jiným následkům než zranění osob, např. poškození majetku.

## VAROVÁNÍ A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



### VAROVÁNÍ: Chytrá ponožka Smart Sock 3 není zdravotnický prostředek.

Ponožka Smart Sock 3 od Owlet vás upozorní, pokud se tepová frekvence nebo hladina kyslíku v krvi vašeho dítěte pohybují mimo stanovený rozsah. Ponožka Smart Sock 3 je určena pro novorozence do osmnácti (18) měsíců, nikoli pro děti starší osmnácti (18) měsíců. Chytrá ponožka Smart Sock 3 od Owlet není zdravotnický prostředek. Chytrá ponožka Smart Sock 3:

- Není určena k diagnostice, léčbě, zmiňování, monitorování, léčení ani předcházení jakéhokoliv onemocnění nebo zranění.
- Neovlivňuje funkci nebo strukturu těla.
- Nedosahuje přímých určených účelů prostřednictvím působení chemických látek.
- Nezabraňuje syndromu náhlého úmrtí kojenců (SNŮK).

Primárním účelem tohoto návodu k použití je: Poskytnout uživatelům základní pokyny a doporučení pro správnou instalaci a používání chytré ponožky Smart Sock 3 od Owlet a vysvětlit funkce, obsluhu, bezpečnostní opatření, údržbu a řešení problémů chytrou ponožkou Smart Sock 3 od Owlet. Je nezbytné, aby si všechny osoby, které mají tuto chytrou ponožku Smart Sock 3 používat nebo nastavovat, pečlivě přečetly návod k použití, aby pochopily, jak chytrou ponožku Smart Sock 3 od Owlet správně používat, a aby tyto pokyny dodržovaly.

Pokud tímto pokynům nerozumíte, neprodleně nás kontaktujte na emailové adrese:  
info@owlet-care.cz

### PRO BEZPEČNOST VÁS A VAŠEHO DÍTĚTE



- ZÁKLADNÍ VĚDY UDRŽUJTE VE VZDÁLENOSTI ALESPŮ 1 METRU OD DĚTSKÉ POSTÝLKY. JELIKOŽ KABEL MŮŽE PŘEDSTAVOVAT NEBEZPEČÍ ÚŠKRCENÍ.
- CHYTRÁ PONOŽKA SMART SOCK 3 OD OWLET JE POUZE POMŮCKOU. NENAHRAZUJE DOZOR Dospělé osoby.
- U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ, DĚTÍ NA PODPŮRNÉM KYSLÍKU NEBO DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZKONZULTUJTE POUŽITÍ CHYTRÉ PONOŽKY SMART SOCK 3 OD OWLET S VAŠIM LÉKAŘEM.
- KDYKOLI SE OZVE ALARM, OKAMŽITĚ ZAREAGUJTE.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S FCC



Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. Používejte POUZE dodané napájecí adaptér. V opačném případě může dojít ke zrušení naší omezené záruky. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné budově. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny výrobce, může narušovat rádiovou komunikaci.



Toto zařízení vyhovuje bezlicenčním kanadským RSS bez výjimek pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

## Reklama a servis

Certus Mercatus s.r.o.  
K Žižkovu 282/9  
190 00 Praha 9

## Informace

email: info@irobot.cz  
telefon: +420 245 001 740

## Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 7.30 - 15.30

# Řešení problémů

Počáteční nastavení | Alarmy | Připojení

## Počáteční nastavení

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Během nastavení nevidím Wi-Fi síť chytré ponožky Smart Sock 3.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základna není zapnutá.</li><li>■ Základna je již připojena k Wi-Fi síti chytré ponožky Smart Sock 3.</li><li>■ Základna je mimo dosah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zapojte základnu do zásuvky.</li><li>■ Zkontrolujte, zda kontrolka Wi-Fi sítě na spodní straně základny svítí. Pokud ano, tento krok přeskočte a pokračujte v založení vašeho účtu v aplikaci.</li><li>■ Umístěte základnu blíže k vašemu Wi-Fi routeru.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ V aplikaci Owlet nevidím naši domácí Wi-Fi síť.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Váš router využívá frekvenční pásmo 5 GHz (výrobek Owlet podporuje pouze 2,4GHz pásmo).</li><li>■ Možná máte skrytý router.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zkontrolujte, zda je zařízení iOS připojeno k 2,4GHz síti (většina 5GHz routerů podporuje i 2,4GHz síť).</li><li>■ Pokyny týkající se skrytých routerů naleznete na <a href="http://owletcare.com/support">owletcare.com/support</a>.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základnu nelze připojit k naší domácí Wi-Fi síti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nesprávné heslo</li><li>■ Základna je mimo dosah vašeho Wi-Fi routeru.</li><li>■ Vaše domácí Wi-Fi síť nefunguje.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Zkontrolujte heslo k vaší síti.</li><li>■ Před nastavením umístěte základnu blíže k routeru a po dokončení nastavení základnu odnesete zpět do dětského pokoje.</li><li>■ Zkuste restartovat telefon a znovu se připojit k Wi-Fi síti.</li><li>■ Resetujte váš Wi-Fi router.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základna po odpojení chytré ponožky Smart Sock svítí bíle.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Probíhá aktualizace softwaru.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Připojte chytrou ponožku Smart Sock zpět k základně, dokud nebude aktualizace dokončena.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základnu nelze spárovat s mým účtem Owlet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základna a vaše zařízení iOS nejsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti.</li><li>■ Podržení malého tlačítka Registrace</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ověřte, zda jsou základna a vaše zařízení iOS připojeny ke stejné Wi-Fi síti.</li><li>■ Stiskněte a uvolněte (nedržte) malé tlačítko Registrace na spodní straně základny a počkejte několik sekund, než se znovu pokusíte spárovat váš účet Owlet.</li><li>■ Připojte vaše zařízení iOS ke stejné 2,4GHz Wi-Fi síti, ke které je připojena základna.</li></ul>

\*Potřebujete technickou podporu? Kontaktujte nás na emailové adrese [info@owlet-care.cz](mailto:info@owlet-care.cz)

## Alarmy

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základna bliká modře a pípá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základna je mimo dosah chytré ponožky Smart Sock.</li> <li>■ Tělo rodiče či jiné osoby starající se o miminko blokuje spojení mezi chytrou ponožkou Smart Sock a základnou. To se běžně stává při krmení, výměně plenek, mazlení apod.</li> <li>■ Slabá nebo vybitá baterie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umístěte základnu blíže k chytré ponožce Smart Sock.</li> <li>■ Změňte polohu miminka nebo zvažte, zda při krmení, výměně plenek, mazlení apod. monitorování nevypnout.</li> <li>■ Nabijte chytrou ponožku Smart Sock.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základna bliká červeně a pípá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nízká nebo vysoká tepová frekvence</li> <li>■ Nízká hladina kyslíku</li> <li>■ Chytrá ponožka Smart Sock na nozičce nesedí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že obrys senzoru na vnější straně chodidla miminka je 1-2 mm za malíčkem.</li> <li>■ Ujistěte se, že chytrá ponožka Smart Sock přiléhá k nozičce (pokud ne, chytrá ponožka obtížně získává údaje. Může se rovněž zbytečně spustit alarm.)</li> <li>■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnaný v okénkách látkové ponožky.</li> <li>■ Zvažte, zda nepoužít jinou velikost látkové ponožky.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základna bliká žlutě a pípá.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Problémy se získáváním údajů</li> <li>■ Chytrá ponožka Smart Sock není správně nasazena.</li> <li>■ Světlo v místnosti je příliš jasné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že obrys senzoru na vnější straně chodidla miminka je 1-2 mm za malíčkem.</li> <li>■ Ujistěte se, že chytrá ponožka Smart Sock přiléhá k nozičce (pokud ne, chytrá ponožka obtížně získává údaje a může se rovněž zbytečně spustit alarm).</li> <li>■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnaný v okénkách látkové ponožky.</li> <li>■ Ztlumte světlo v místnosti.</li> </ul>

## Připojení

Problém	Příčiny	Řešení
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základna není připojena k internetu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Základna je mimo dosah vašeho Wi-Fi routeru.</li> <li>■ Vaše domácí Wi-Fi síť nefunguje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umístěte základnu a Wi-Fi router blíže k sobě (zesilovače Wi-Fi ani další routery problém nevyřeší).</li> <li>■ Resetujte váš Wi-Fi router.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chytrá ponožka Smart Sock se nenabíjí.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chytrá ponožka Smart Sock není úplně zapojena.</li> <li>■ Chytrá ponožka Smart Sock vyžaduje resetování.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nechte chytrou ponožku Smart Sock nabíjet, dokud neustýšíte cvaknutí a nezačne zeleně blikat.</li> <li>■ Vypněte a znovu zapněte elektronickou součástku chytré ponožky Smart Sock.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Místo údajů o tepové frekvenci a hladině kyslíku jsou vidět pomlčky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chytrá ponožka Smart Sock se snaží získat spolehlivý údaj.</li> <li>■ Miminko příliš pohybuje nožičkou.</li> <li>■ Špatně nasazená chytrá ponožka Smart Sock</li> <li>■ Špatně padnoucí látková ponožka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ujistěte se, že jsou senzory zarovnané ve středu okének látkové ponožky.</li> <li>■ Nedávejte dítě do kolečky ani na vibrační podložky, protože by mohly narušit správnou funkci zařazení.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda je chytrá ponožka Smart Sock správně nasazená.</li> <li>■ Zkontrolujte, zda jste použili vhodnou velikost látkové ponožky.</li> </ul>



# Tipy pro zdravé prostředí pro spánek

Rádi bychom se s vámi podělili o několik tipů, jak vašemu miminku zajistit zdravý a bezpečný spánek.

- Miminko by mělo být v postýlce samotné a ležet na zádech. Spaní na boku nebo na bříše není pro miminka bezpečné.
- Pořídte pro miminko postýlku, která splňuje platné bezpečnostní normy. Rovněž zakupte pevnou matraci, která do postýlky dobře padne a povlečte ji dobře přiléhajícím prostěradlem.
- Do postýlky neumísťujte žádné měkké, volně ležící nebo načechrané předměty. To zahrnuje polštáře, deky, přikrývky, ochranné obložení do dětských postýlek, plyšáky, hračky a jakékoli jiné měkké předměty.
- Místo klasické přikrývky použijte kojeneckou přikrývku, kterou je možné zapnout jako oděv, nebo podobnou přikrývku, která vaše miminko udrží v teple a bezpečí.
- Sdílejte s vaším miminkem pokoj, ale ne postel. Vaše miminko by mělo spát v oddělené postýlce blízko vaší postele. Bude tak v bezpečí a krmení bude snazší. Pokud by miminko spalo s vámi, chytrá ponožka Smart Sock nebude správně fungovat. Vaše tělo by totiž rušilo bezdrátový signál ponožky.
- Dbejte na to, abyste s miminkem neusnuli ve vaší posteli, na pohovce nebo v křesle.
- Nikdy nenechávejte miminko spát na měkkých površích, jako jsou postele pro dospělé nebo pro děti, pohovky, křesla, vodní postele, polštáře, polštářky, přikrývky, ovčí kůže a podobné předměty.
- Nepoužívejte polštáře, polohovací klíny ani fixační podložky, abyste miminko podepřeli, udrželi na zádech nebo mu zabránili v otočení.
- Dbejte na to, aby se miminko nadměrně nezahřálo. Oblékejte jej do lehkého pyžámka a v místnosti udržujte teplotu, která je příjemná pro lehce oblečeného dospělého.
- Zvažte, zda miminku během odpoledního a večerního spánku nenabídnout dudlík. Kojencům dudlík nabídněte až ve věku 3–4 týdnů, až si zvyknou na kojení.
- Poučte o těchto zásadách bezpečného spánku všechny, kdo se o vaše miminko starají!

SK

## Pre aký výrobok je tento návod na používanie určený?

Inteligentná ponožka Smart Sock 3

Inteligentná ponožka Smart Sock Plus

## Čo nájdete v balení

Ponožky veľkosti 1, 2 a 3, pre každú veľkosť ponožka na pravú aj ľavú nožičku

Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock

Základňa


Kábel základne

Napájací adaptér

Úvodná príručka

\* Ponožky veľkosti 3 sú iba v balení inteligentnej ponožky Smart Sock Plus.

## Ako funguje inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet?

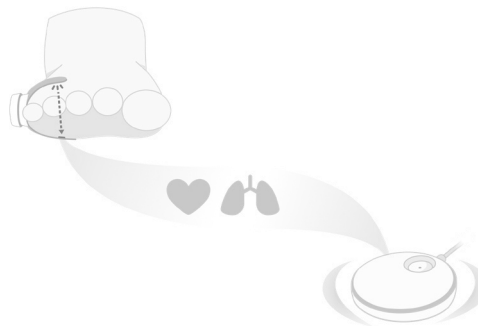

Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock využíva pulzovú oxymetriu na získavanie údajov z nožičky spiaceho bábätka. Svetielko ponožky svieti cez pokožku a prítok krvi a hladina kyslíka sa odhaduje na základe toho, koľko svetla zachytí senzor.


Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock zbiera údaje a posiela ich do základne. Na základe týchto údajov vás základňa v prípade potreby upozorní. Základňa má za úlohu vás v prípade červeného alarmu včas upozorniť, preto ju odporúčame umiestniť tak, aby ste ju vždy počuli.

## Ako funguje aplikácia

**Ak je inteligentná ponožka Smart Sock pripojená k Wi-Fi sieti:** Základňa prostredníctvom Wi-Fi siete odosiela informácie na cloud Owlet. Cloud Owlet tieto údaje umožňuje zobrazíť v aplikácii Owlet. Vďaka tomu si môžete všetky údaje prezerat' v reálnom čase a dostávať oznámenia z aplikácie, nech ste kdekoľvek.

### **Režim LAN (lokálne siete):**

Ak chcete používať režim LAN, telefón musí byť pripojený k rovnakej Wi-Fi sieti ako základňa. Aplikácia pomocou Wi-Fi siete nadviaže počítačové spojenie s cloudom Owlet a bude prijímať údaje, dokým aplikáciu nezatvoríte a dokým nedôjde k zmene Wi-Fi siete aplikácie alebo základne.

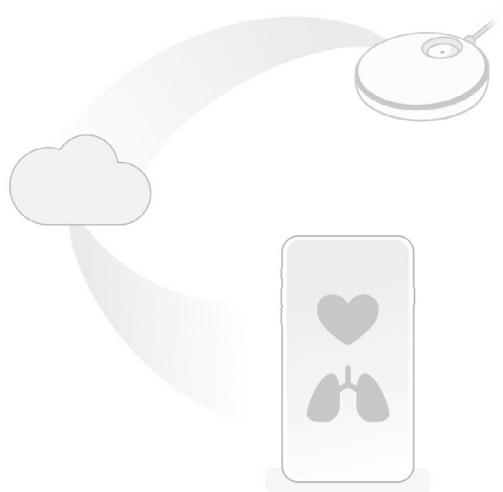

# Ako nastaviť a používať inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet.

## Požiadavky

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet vyžaduje prístup k iOS alebo Android zariadeniu, na ktorom je nainštalovaná aplikácia Owlet Care. Informácie o minimálnych verziách operačných systémov nájdete v obchode s aplikáciami.


Inteligentná ponožka Smart Sock Plus je vhodná pre deti s maximálnou hmotnosťou 24,9 kg.

Čítanie nameraných hodnôt v reálnom čase, vzdialený prístup k aplikácii a niektoré funkcie aplikácie vyžadujú pripojenie k bezdrôtovej 2,4GHz sieti. Hotspot Wi-Fi siete a 5GHz sieť nie sú podporované.

## Ak chcete nastaviť inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet:

① Stiahnite si aplikáciu Owlet.

Aplikácia je dostupná pre zariadenia iOS a Android.

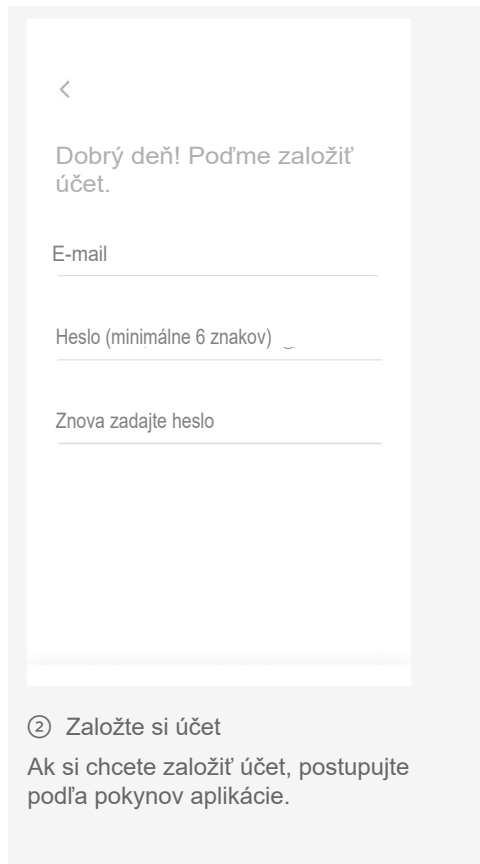



Kto ste?

Meno

Priezvisko

Telefónne číslo

Dátum narodenia

PSČ



Práve vám bol poslaný e-mail  
s potvrdzovacím kódom.

Znovu poslať e-mail.



Váš účet bol potvrdený. Vitajte  
v rodine Owlet.

Domov >

Pridať profil bábätka alebo zariadenie

Začíname



Viac informácií o inteligentnej ponožke Smart Sock od Owlet >



Máte zariadenie Owlet, ktoré chcete nastaviť?

Inteligentná ponožka Smart Sock 3

Nie >

Áno >

Aké zariadenie chcete nastaviť



Inteligentná ponožka Smart Sock 3 >



Inteligentná ponožka Smart Sock 2 >




Kamera >

### ③ Nastavte zariadenie

**POZNÁMKA:** Ak už máte účet Owlet a pridávate ďalšie zariadenie Owlet, postupujte podľa pokynov aplikácie a pridajte nové zariadenie.




④ Základňu pripojte k zdroju napájania a inteligentnú ponožku Smart Sock k základni.

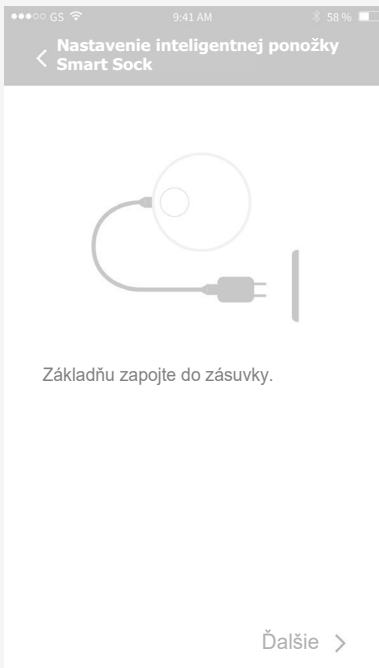


Podme základňu pripojiť k Wi-Fi sieti, aby ste si údaje mohli zobraziť v telefóne.

1. Prejdite do nastavenia Wi-Fi siete vo vašom telefóne a vyberte sieť „Owlet“.

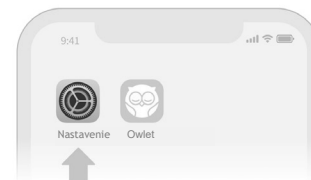

2. Vráťte sa do aplikácie Owlet.

*Ak budete presmerovaní alebo sa zobrazí správa „Presmerovanie sa nepodarilo“, je to v poriadku! Stačí sa vrátiť do aplikácie Owlet.*

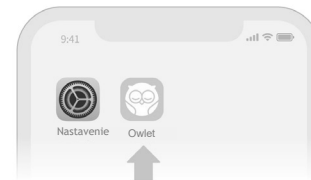

(Táto obrazovka platí iba pre iOS zariadenia.)



Váš účet bol potvrdený.  
Vitajte v rodine Owlet!

Domov >

(Táto obrazovka platí iba pre Android zariadenia.)

### < Nastavenie Wi-Fi siete

Zvoľte zariadenie Owlet, ktoré chcete nastaviť.

 Owlet - 383G9f65

(Táto obrazovka platí iba pre Android zariadenia.)


9:41 AM 58%

### < Nastavenie Wi-Fi siete

Zvoľte router Wi-Fi siete.

(Zatiaľ nie je kompatibilný s 5,0GHz sieťami.)

 Wi-Fi sieť Novákovcov

 Wi-Fi sieť vášho suseda s čudným názvom

 Jurský dom

 Kováčovci

Podľa pokynov aplikácie môžete pripojiť inteligentnú ponožku Smart Sock k Wi-Fi sieti, zaregistrovať sa a spárovať ponožku a v prípade potreby ponožku aktualizovať.





## Nastavenie Wi-Fi siete

### Rýchla kontrola

Pozrite sa na zadnú stranu základne a skontrolujte stav Wi-Fi siete.

Kontrolka Wi-Fi siete nesvieti. >

Kontrolka Wi-Fi siete svieti. >

## Registrácia základne



Stlačte a podržte tlačidlo na základni (dokým sa nezvú dve pípnutia).

Registrácia môže po stlačení tlačidla trvať až 10 sekúnd.




## Párovanie inteligentnej ponožky Smart Sock



Registrácia prebehla úspešne!

Inteligentnú ponožku Smart Sock pripojte k základni.

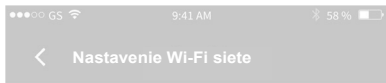

Inteligentná ponožka Smart Sock bola úspešne spárovaná!

Základňa by mala blikať bielo, čo znamená, že inteligentná ponožka Smart Sock sa nabíja.

Ďalej sa uistíme, že vaše zariadenie je aktualizované.



Aktualizácia inteligentnej ponožky Smart Sock 3

Počas aktualizácie neodpájajte základňu od napájania.



Už to bude...



## Dôležité bezpečnostné pokyny

Správne nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock

Bezpečnosť vášho bábätka je pre nás na prvom mieste a vieme, že aj pre vás.

Uvedomte si prosím, že nesprávne nasadená ponožka môže byť pre bábätko nepohodlná a na nožičke sa môžu objaviť červené škvrny, otľaky alebo pluzgiere. Nožičku bábätka udržiajte v suchu, používajte ponožku správnej veľkosti a dodržujte naše pokyny pre správne nasadenie ponožky.


Údržba inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku Smart Sock a senzor aspoň jedenkrát týždenne ručne vyperte v jemnom pracom prípravku. Pred ďalším použitím nechajte ponožku úplne vyschnúť.


Zásady bezpečného spánku

Nezabudnite vždy dodržiavať zásady bezpečného spánku a vyhýbať sa nebezpečným plochám na spanie (o. i. hojdačiek, autosedačiek) a spaniu v spoločnej posteli.

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owllet nenahrádza bezpečný spánok ani rodičovskú starostlivosť. Ubezpečte sa, že dodržiavate zásady bezpečného spánku a inteligentnú ponožku Smart Sock od Owllet používate ako pomôcku, ktorá vám okrem starostlivosti, bezpečia a lásky, ktoré sa vášmu bábätku dostávajú, pomôže zistiť, ako sa mu dári.

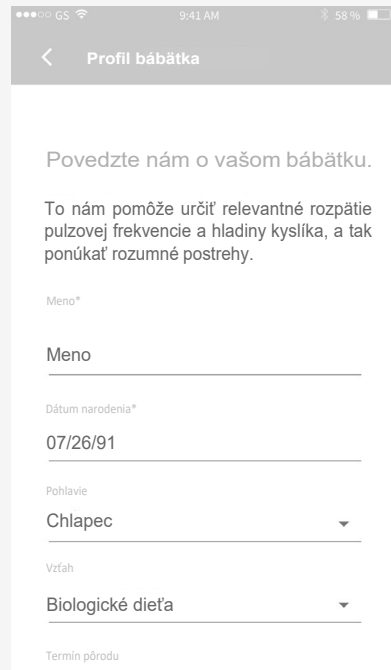

⑤ Vytvorte profil vášho bábätka. Aplikácia vám pomôže vytvoriť profil vášho bábätka a priradiť ho k zariadeniu Owlet.

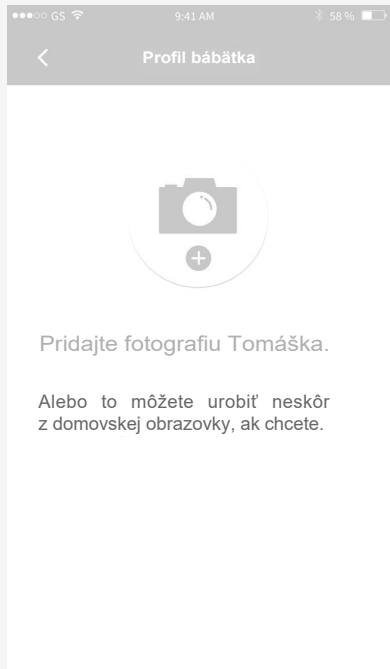


## Správna veľkosť inteligentnej ponožky Smart Sock a jej nasadenie

Inteligentná ponožka Smart Sock je dostupná v dvoch veľkostiach a pre každú veľkosť je k dispozícii ponožka pre pravú i ľavú nožičku:

Veľkosť 1 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou do 5,4 kg.

Veľkosť 2 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou 5,4 až 13,5 kg.

Veľkosť 3 je vhodná pre bábätká s hmotnosťou 13,5 až 24,9 kg.

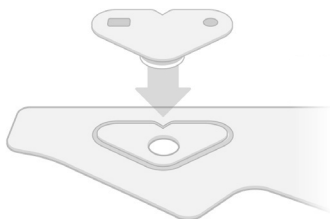

*\*Ponožky veľkosti 3 sú iba v balení inteligentnej ponožky Smart Sock Plus.*



### Senzor pripevnite k látkovej ponožke

Obrys senzora zarovnajte s líniou na látke, senzor pritlačte k ponožke, aby sa pripevnil, a zacvaknite ho na miesto.

### TIP:

Ak si nie ste istí vhodnou veľkosťou, začnite s menšou ponožkou.



### Nasaďte ponožku

Ponožku priložte k boku nožičky tak, aby sa senzor nachádzal za malíčkom.

Pásik zaistíte pod prstami nôh, potom pásik členka omotáte okolo zadnej



časti členka a na priehlavku ho zaistíte.

Pri správnom umiestnení by mal pásik na priehlavku smerovať k palcu a senzor by sa mal nachádzať na malíčkovej hrane nožičky bábätka tak, aby hlava sovičky smerovala k prstom.



### TIPY PRE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 3 NA NOŽIČKÁCH BATOLIAT A DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU:

Batoľatá a deti predškolského veku sú oveľa pohyblivejšie a aktívnejšie ako dojčatá, preto by sme sa s vami chceli podeliť o zopár užitočných rád:

1. Inteligentnú ponožku Smart Sock nasadíte až potom, čo dieťa uložíte do postele, aby v nej čo najmenej chodilo. Pri chôdzi s nasadenou ponožkou sa môže poškodiť senzor.
2. Počkajte, až dieťa zaspí, až potom zapnite základňu. Tak zamedzíte žltým alarmom, ktoré by vás zbytočne upozorňovali na prevaľovanie dieťaťa pri zaspávaní. Základňu môžete zapnúť pomocou aplikácie alebo priamo na jednotke.
3. Ak vaše dieťa inteligentnú ponožku Smart Sock nikdy predtým nenosilo, môže váhať a klásť vám otázky. Dovoľte mu, aby si predtým, než mu ponožku nasadíte, zariadenie pozrelo a zvyklo si na neho.

## Získavanie údajov a oznámení

Prv než si dieťa pôjde zdiemnuť alebo spať, inteligentnú ponožku Smart Sock vyberte zo základne a nasadte mu ju.

Svetlá základne začnú zeleno blikať, čo znamená, že zariadenie sa pokúša snímať hodnoty. Keď základňa začne získavať príslušné údaje, bude pulzovať zeleno.

### **Žltý alarm**

Pri žltom alarme bude základňa stanice blikať žltá, hrať uspávanú hudbu a aplikácia vám pošle push oznámenie. Žltá farba signalizuje, že ponožka je zle nasadená alebo spadla z nožičky dieťaťa a zariadenie nedokázalo minimálne 60 sekúnd získať správne údaje.

### **Modrý alarm**

Pri modrom alarme bude základňa stanice blikať modro, hrať uspávanú hudbu a aplikácia vám pošle push oznámenie. Modrá farba signalizuje, že ponožka je minimálne 60 sekúnd mimo dosahu základne, upozorňuje na vybitú batériu alebo blokovanie signálu.

Ľudské telo môže rušiť signál medzi základňou a ponožkou. Ak dieťa práve chováte, neotáčajte sa k základni chrbtom, aby ste predišli zbytočným oznámeniam. Ak sa modrý alarm spúšťa opakovane, ponožku a základňu posuňte bližšie k sebe, aby ste predišli opakovaným oznámeniam.

### **Červený alarm**

Červená farba signalizuje oznámenie najvyššej priority. Základňa má k dispozícii tri druhy červených oznámení, pri ktorých bliká červeno a vydáva vysoký zvuk.

**Nízka hladina kyslíka:** Upozorní vás, ak hladina kyslíka u dieťaťa klesne pod 80 %.

**Nízka pulzová frekvencia:** Upozorní vás, ak pulzová frekvencia u dieťaťa klesne pod 60 úderov za minútu a hladina kyslíka klesne pod 85 %.

**Vysoká pulzová frekvencia:** Upozorní vás, ak pulzová frekvencia u dieťaťa prekročí 220 úderov za minútu.

### **TIP:**

Ak má dieťa nasadenú ponožku počas kŕmenia, môže sa stať, že spustí červený alarm, lebo pri jedle prirodzene klesá obsah kyslíka a zvyšuje sa pulzová frekvencia.



### **Zastavenie zvuku oznámení**

Zvuk akéhokoľvek aktívneho alarmu môžete krátkym stlačením tlačidla základne alebo pomocou aplikácie na 60 sekúnd zastaviť.

Zastavenie zastaví zvuk základne a aplikácie – svetelný krúžok bude na základni ďalej svietiť a v aplikácii budú k dispozícii podrobnosti. Alarm zostane aktívny, dokým sa stav nevyrieši.

Ak spúšťač (nízka hladina kyslíka, nízka alebo vysoká pulzová frekvencia) počas zastavenia prestane, alarm sa zastaví.

Ak pri zastavení dôjde k spusteniu nového alarmu s rovnakou alebo vyššou prioritou, tento alarm sa spustí bez ohľadu na zastavenie.

### **Základňa**

Základňa inteligentnej ponožky Smart Sock pomocou nasledujúcich farebných svetiel signalizuje rôzne prevádzkové stavy:

**Postupne bliká zeleno:** Získavanie údajov

**Pulzuje zeleno:** Hodnoty sú v norme.

**Bliká modro:** Inteligentná ponožka Smart Sock je mimo dosahu základne, batéria je vybitá alebo niečo blokuje signál.

**Bliká žltó:** Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená alebo spadla z nožičky.

**Bliká červeno:** Pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka je mimo stanoveného rozsahu.

**Pulzuje bielo:** Inteligentná ponožka Smart Sock sa nabíja.

**Svieti bielo:** Inteligentná ponožka Smart Sock je plne nabitá.

**Postupne bliká bielo:** Inteligentná ponožka Smart Sock nie je spárovaná.

### **Ako zapnúť monitorovanie a základňu?**

Ak sa senzor nabíja, vyberte ho z nabíjacieho portu, alebo stlačte základňu a uvoľnite ju. Po stlačení základne sa ozve pípnutie a základňa sa rozsvieti zeleno.

### **Ako vypnúť základňu a monitorovanie?**

Stlačte základňu a podržte ju, dokým nezhasne zelené svetlo a neozve sa pípnutie.

## Nabíjanie inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentnú ponožku Smart Sock položte na nabíjací port, ktorý sa nachádza na hornej strane základne a ubezpečte sa, že svetlo základne a ubezpečte sa, že svetlo základne svieti bielo.

### Úroveň nabitia inteligentnej ponožky Smart Sock

Úroveň nabitia batérie inteligentnej ponožky Smart Sock môžete kontrolovať v aplikácii.



Ak svetlo základne pulzuje bielo, ponožka sa nabíja. Ak svieti bielo, ponožka je plne nabitá.

## Upozornenie na slabú batériu inteligentnej ponožky Smart Sock

Ak aplikácia zistí, že batéria inteligentnej ponožky Smart Sock sa za menej ako hodinu vybije, upozorní vás na to modrým alarmom.

V tomto prípade však základňa nebude vydávať žiadny zvuk ani blikať.

Stav batérie môžete kedykoľvek zobrazíť na stavovej obrazovke zariadenia.


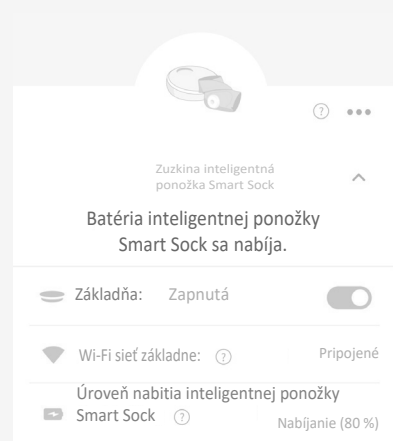
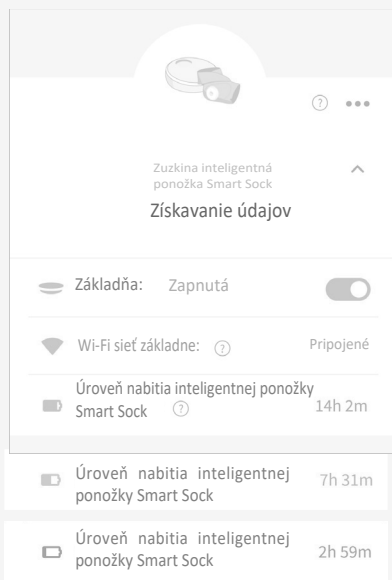


## História

Na karte História v aplikácii sa zobrazujú posledné relácie spánku, údaje a alarmy. Základňa a aplikácia vyžadujú pri zobrazení História pripojenie k Wi-Fi sieti.

Grafy zobrazujú priemerné hodnoty pulzovej frekvencie, kyslíka a spánku za uplynulých 10 minút a aktualizujú sa každých 10 minút počas každého spánku.

Stiahnutím grafov dolu obnovíte údaje alebo zatvoríte a znova otvoríte aplikáciu. História uchováva údaje o posledných 30 reláciách spánku.

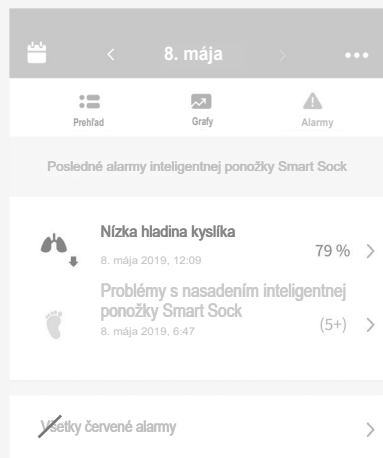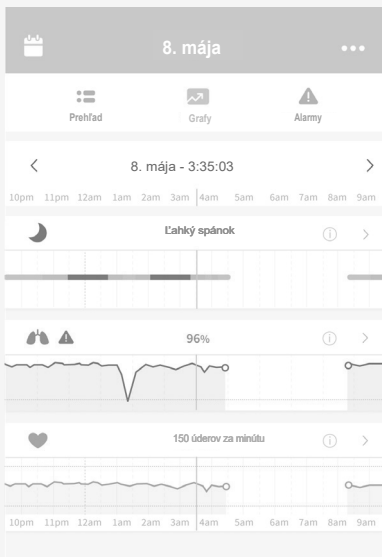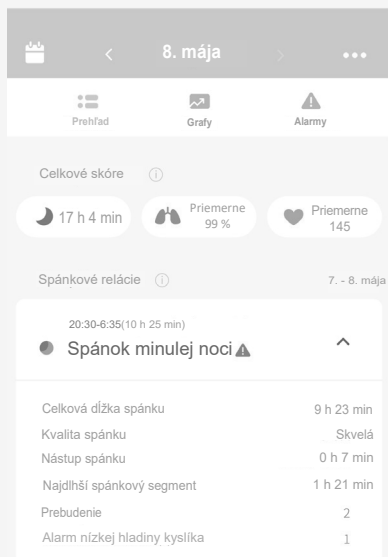

## Po prebudení

Keď dieťaťu dáte dolu inteligentnú ponožku Smart Sock, vráťte ju do základne, aby sa mohla nabíjať.

### Údržba a skladovanie inteligentnej ponožky Smart Sock

Druhú inteligentnú ponožku Smart Sock veľkosti, ktorú práve používate, skladujte na ľahko prístupnom mieste, aby ste ponožky mohli pravidelne striedať na oboch nožičkách. Druhú veľkosť si odložte pre budúce použitie.

Spoločnosť Owlet odporúča prať ponožku a senzor minimálne jedenkrát za dva týždne, aby sa zabránilo podráždeniu pokožky spôsobenému znečistenou ponožkou a senzorom. Ponožku a senzor perte ručne v jemnom pracom prípravku a studenej vode. Pred ďalším použitím ju nechajte úplne vyschnúť.

### Ako vypnúť senzor inteligentnej ponožky Smart Sock

Senzor vyberte zo základne. Napájací kábel odpojte od základne. Stlačte a podržte tlačidlo základne a súčasne zasunúť napájací kábel. Držte tlačidlo základne, dokým sa svetlo základne nerozsvieti oranžovo a neozvú sa štyri pípnutia. Stlačte tlačidlo. Svetlo v ponožke zhasne. Ak chcete ponožku opäť zapnúť, senzor vložte do nabíjacieho portu základne.

## Tipy a triky

### ***Nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock***

Nesprávne nasadená ponožka môže byť pre dieťa nepohodlná a na nožičke sa môžu objaviť červené škvrny, otlaky alebo pľuzgiere. Ubezpečte sa, že dieťa má ponožku správnej veľkosti: je dôležité, aby ponožka dobre sedela a nebola tesná okolo prstov ani členka. Odporúčame pravidelne striedať pravú a ľavú ponožku.

Ak pokožka nožičky sčervenie, prestaňte na tejto nožičke ponožku používať a používajte ju na druhej nožičke, dokým sčervenenie úplne nezmizne.

### ***Kam umiestniť základňu?***

Základňa musí byť v dosahu používanej inteligentnej ponožky Smart Sock, aby nedochádzalo k zbytočnému spusteniu modrého alarmu. Dosah Bluetooth je až 30 m. Základňa má za úlohu vás v prípade červeného alarmu včas upozorniť, preto ju odporúčame umiestniť tak, aby ste ju vždy počuli.

### ***Ako otestovať alarmy***

#### **Červený**

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Stlačte a podržte základňu, dokým sa neozvú tri pípnutia, potom ju uvoľnite. Ak chcete zastaviť zvuk, znova stlačte základňu, alebo zvuk zastavte v aplikácii. Ak chcete zariadenie resetovať, stlačte a podržte základňu, dokým svetlo základne nezhasne a nezve sa pípnutie. Následným stlačením základňu opäť zapnite.

#### **Modrý alarm**

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Držte senzor a vzdialte sa od základne.

#### **Žltý alarm**

Senzor vyberte zo základne a nechajte zapnuté monitorovanie. Inteligentnú ponožku Smart Sock nasadte na nožičku dieťaťa alebo prst dospelého, dokým zariadenie nezíska údaj. Potom dajte ponožku dolu a chvíľu počkajte. To môže trvať až 60 sekúnd.


### ***Ako zrušiť pripojenie k Wi-Fi sieti***

#### **Pomocou základne**

Senzor vyberte zo základne. Stlačte a podržte tlačidlo základne a súčasne do základne zasuňte napájací kábel. Držte tlačidlo základne, dokým sa svetlo základne nerozsvieti oranžovo a neozvú sa štyri pípnutia. Potom trikrát stlačte tlačidlo základne. Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti.

### ***Máte doma neposedníka?***

Dozeráme na vaše dieťa v každej situácii, ale niekedy sa tak vrtia, že senzor nedokáže získať potrebné údaje. V tomto prípade sa v aplikácii zobrazia kmitajúce nožičky. Pohyb má vplyv na kvalitu získaných údajov, takže namiesto zbytočného upozornenia sa snímania a oznámenia na chvíľu zastavia, dokým sa opäť nezistia kvalitné hodnoty.

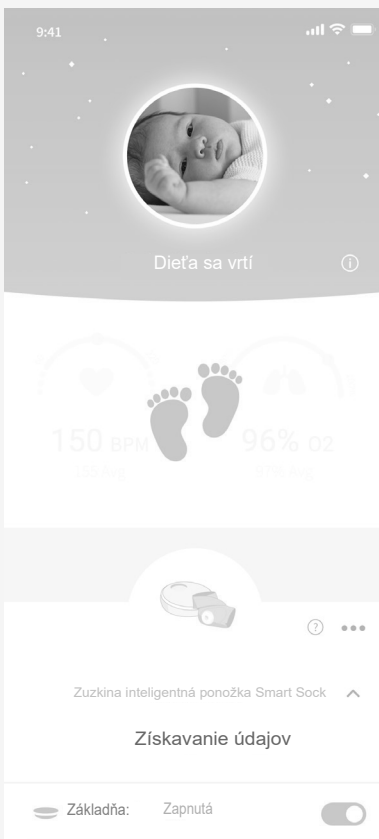


### ***Funguje inteligentná ponožka Smart Sock aj pod detským oblečením?***

Inteligentná ponožka Smart Sock je navrhnutá tak, aby sa pohodlne vošla pod pyžamko, zavinovačky a ponožky, a zaistila tak dieťaťu ničím nerušený spánok.

### ***Zdieľanie prístupu k aplikácii***

Spoločnosť Owlet pracuje na možnosti pridania viacerých účtov pre zdieľanie prístupu k aplikácii. Ak aplikáciu chcete zatiaľ zdieľať s priateľmi alebo s rodinou, stačí im oznámiť prihlasovacie údaje k vášmu účtu.

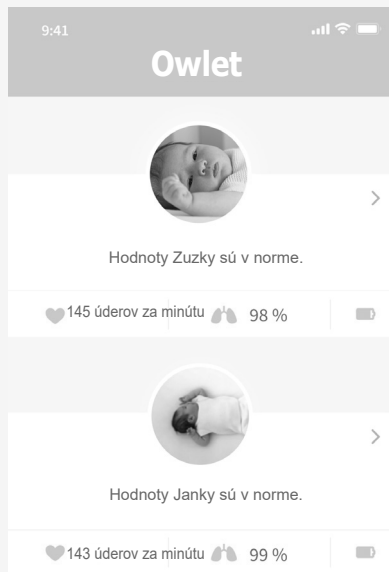

### **Viac detí? Žiadny problém!**

Aplikácia Owlet podporuje založenie niekoľkých detských profilov a ku každému dieťaťu možnosť priradenia ľubovoľného zariadenia. Dbajte, aby každé dieťa malo svoju inteligentnú ponožku Smart Sock a príslušnú základňu, aby v prípade alarmu nedošlo k zámene.

### **Jas základne**

Základňa je vybavená senzorom okolitého svetla a automaticky si upraví jas svetla podľa svetla v miestnosti.

### **Centrum pre nápoved' a podporu**

V aplikácii prejdite do časti Účet > Nápoved' a podpora a kontaktujte náš tím zákazníckeho servisu prostredníctvom chatu v aplikácii, emailu alebo telefónu, alebo prejdite na stránku [www.owletcare.sk](http://www.owletcare.sk). Ďalšie tipy a triky nájdete na karte Sprievodca v aplikácii.

### **Uskladnenie inteligentnej ponožky Smart Sock**

Senzor inteligentnej ponožky Smart Sock obsahuje batériu, ktorá sa po dlhšom čase vybije. Ak sa batéria vybije úplne, dôjde k poškodeniu senzora.

*6 krokov, ako uložiť senzor inteligentnej ponožky Smart Sock:*

- 1. Senzor plne nabite.**
- 2. Senzor vyberte zo základne.**
- 3. Vypnite ponožku podľa pokynov na strane 46.**
- 4. Odpojte základňu od napájania.**
- 5. Senzor, základňu, káble, zástrčku a inteligentné ponožky Smart Sock uložte na chladné a suché miesto.**
- 6. Každých 6 mesiacov senzor dobite a potom zopakujte kroky 1–5.**



## Prohlášení o shodě

**Výrobce:** *Owlet Baby Care*  
2500 Executive PKWY  
Lehi, Utah 84043  
Telefon: 844.334.5330

**Výrobek:** Owlet Smart sock 3

**Číslo výrobku:**  
OBL 3.0, OSS 3.0 Owlet Sock 3rd Generation

**Popis výrobku:** Owlet Smart Sock 3 se skládá ze dvou součástí – základna ( OBL) a ponožka se senzorem ( OSS). Senzor používá přenos PPG k získání hodnot srdečního rytmu a hladiny kyslíku dítěte nasazením ponožky na nohu. Zařízení je napájeno nabíjecí Li-Ion baterií. Přenáší pohybové pulzní oxymetrie data do základny přes Bluetooth Low energy ( BLE). Využívá Nordic nRF52840 IC, které podporuje standardní BLE modifikace a komunikační techniky.

**Název zástupce:** Obelis S.A

### **Adresa registrovaného zástupce:**

Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brussels, BELGIUM.  
Tel: 32 (0) 2 732 5954  
Fax: 32 (0) 2 732 60 03  
Email: mail@obelis.net  
Jméno zástupce: Mr. Gideon ELKAYAM

Níže podepsaný, v zastoupení Owlet Baby Care of Lehi, Utah, tímto prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje a je ve shodě s nařízeními:

- Council Directive 2014/53/EU (16 April 2014) – Radio Equipment
  - Council Directive 2014/35/EU (26 Feb 2014) – Low voltage
  - Council Directive 2011/65/EU (08 Jun 2011) – Restrictions of Hazardous Substances
  - Council Directive 2014/30/EU (26 Feb 2014) – Electromagnetic Compatibility
  - Council Directive 2001/95/EC (03 Dec 2001)– General Product Safety
  - Council Directive 2012/19/EU (04 Jul 2012) – Waste Electrical and Electronic Equipment
- Technická dokumentace požadovaná k těmto Nařízením je uschována v centrále společnosti Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Lehi, Utah.

Vydáno dne: 8. 12. 2021

Tammy Lavery  
*Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs*



## SKVarovanie / Dôležité bezpečnostné pokyny

### **VAROVANIE: Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet nie je zdravotnícka pomôcka.**

Nie je určená na používanie ako zdravotnícka pomôcka ani na nahrádzanie zdravotníckej pomôcky. Neslúži a nie je určená na diagnostiku, liečenie, ošetrovanie, zmiernenie ani na predchádzanie žiadnych chorôb ani zdravotných stavov, ani na vyšetrovanie, nahradenie alebo úpravu anatómie alebo iného fyziologického procesu.

Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet je určená pre zdravé deti do veku 18 mesiacov, preto prahové hodnoty oznamovania na inteligentnej ponožke Smart Sock od Owlet nie sú také prísne ako u lekárskeho monitorov.

*Majte na pamäti, že: Tento výrobok je určený iba na to, aby vám pomáhal sledovať stav vášho dieťaťa, a nie je určený na to, aby nahradil starostlivosť o dieťa. Ste zodpovední za zdravie a dobré životné podmienky svojho dieťaťa a dodržiavanie zásad bezpečného spánku, zdravia a starostlivosti.*

- Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter alebo lekársky monitor dychu.
- Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet ako náhradu starostlivosti dospelého človeka o dieťa.

### Záruka

Spoločnosť Owlet si za svojimi výrobkami hrdo stojí. Naše záruky nájdete na webovej stránke: [www.owletcare.sk](http://www.owletcare.sk).

### Obchodné podmienky

Používanie výrobkov spoločnosti Owlet podlieha podmienkam, ktoré nájdete na webovej stránke: [www.owletcare.sk](http://www.owletcare.sk). Používaním výrobku spoločnosti Owlet vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami.

Kontaktné informácie pre váš región nájdete na webovej stránke: [www.owletcare.sk](http://www.owletcare.sk).

### Bezpečnosť

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a dodržujte ich.

### **PRE BEZPEČNOSŤ A VÁŠU DIEŤA**

**VŽDY, KEĎ SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.**



**VAROVANIE: ZÁKLADNŮ VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIEĽKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENAT NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA.**

INTEĽIGENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK OD OWLET JE IBA POMÔCKOU.  
NENAHRÁDZA DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY.

U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOU KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE INTEĽIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK OD OWLET S VAŠIM LEKÁROM.



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej budove. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu,

a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.

### IC: 21386-OBL3A (základňa)

### IC: 21386-OSS3A (senzor)

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC a vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Spoločnosť Owlet Baby Care vyhlasuje, že inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: <https://owletbabycare.co.uk/pages/ce-compliance>

2 402-2 480 MHz (výstupný výkon 63 mW)  
Bluetooth základne  
2 412-2 462 MHz (výstupný výkon 75 mW)  
Wi-Fi sieť základne  
2 402-2 480 MHz (výstupný výkon 6,3 mW)

### Bluetooth senzora



Spoločnosť Owlet sa zaviazala plniť požiadavky smernice 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Viac informácií o správnej likvidácii výrobkov Owlet v rámci Európskej únie a vo Veľkej Británii nájdete na našich webových stránkach.

VSTUP: 100-240 V~0,2 A 50-60 Hz  
VÝSTUP: 5 V, 1 A



800433

Splňa požiadavky normy UL  
62368-1 a CAN/CSA-C22.2 č.  
62368-1

Americký patent č. 9,693,730 a 10,449,837.  
Prebieha konanie o udelení ďalších  
patentov.



# Stručný popis inteligentnej ponožky Smart Sock

Inteligentná ponožka Smart Sock™ 3 od Owlet pomocou dvoch senzorov monitoruje životné funkcie bábätka.



Veľkosť 1

Veľkosť 2



## Senzory inteligentnej ponožky Smart Sock

Senzor sníma pulzovú frekvenciu a hladinu kyslíka bábätka.



## Okienka ponožky

Senzory zarovnajte do stredu okienok ponožky.



## Padne každej nožičke

Inteligentnú ponožku Smart Sock od Owlet možno nasadiť na pravú aj ľavú nožičku. Dbajte, aby obrys senzora a senzor na vonkajšej strane nožičky boli za malíčkom, iba tak je ponožka správne nasadená a môže získavať potrebné údaje.




## Pravá nožička

Inteligentná ponožka je vydutá na priehlavku.



## Ľavá nožička

Inteligentná ponožka je vydutá na chodidle.

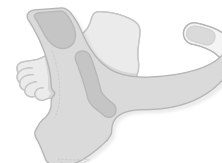

## Nasadenie inteligentnej ponožky Smart Sock

**Inteligentnú ponožku neut'ahujete príliš tesno.**

Ak pásiok presiahne suchý zips, vyskúšajte menšiu veľkosť ponožky.

# Stručný popis základne

Stačí jediný pohľad na základňu a zistíte, ako sa darí vášmu bábätku

## Kontrolka inteligentnej ponožky Smart Sock

Zelené svetlo signalizuje, že inteligentná ponožka Smart Sock je pripojená k základni.

## Registrácia

Pri nastavovaní výrobku vás aplikácia vyzve, aby ste toto tlačidlo jedenkrát stlačili.

## Kontrolka Wi-Fi siete

Zelené svetlo signalizuje, že základňa je pripojená k Wi-Fi sieti.

## Zapnutie/vypnutie


Ak chcete základňu vypnúť, stlačte ju a uvoľnite. Základňa zapípa a svetlo zhasne.

## Stavové svetlo

Svetelný krúžok vás informuje o stave vášho bábätka. Podrobnosti nájdete v aplikácii.

## Stlmenie svetla

Stlačením a podržaním základne môžete prepínať medzi jasným denným režimom a tmejším nočným režimom svetla.

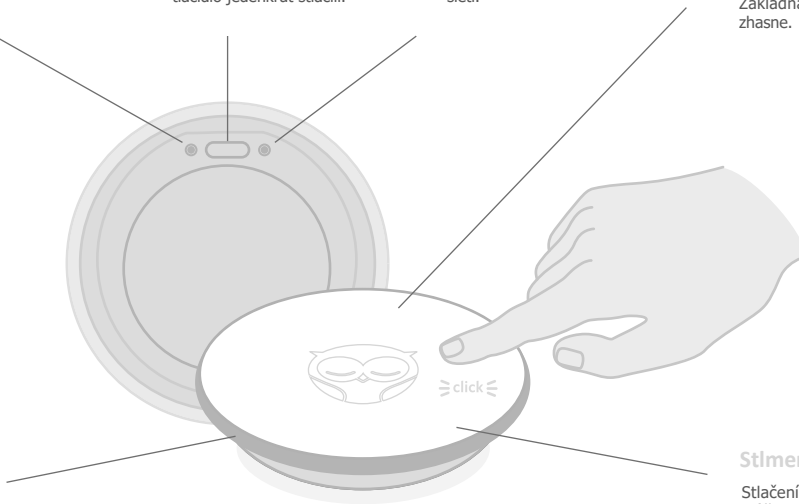

# Farby svetla základne

Základňa sa môže rozsvietiť piatimi farbami, ktoré indikujú rôzne stavy, a vydávať zvukové upozornenia. Ak si chcete vypočuť príklady, prejdite do aplikácie.

## Stav




### Bliká zeleno

Prvé meranie pulzovej frekvencie a hladiny kyslíka



### Pomaly pulzuje zeleno

Pulz aj hladina kyslíka sú v norme.

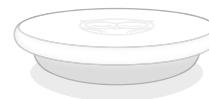

### Svieti bielo


Inteligentná ponožka Smart Sock je pripojená a nabíja sa.

## Alarmy




### Bliká červeno

Pulz alebo hladina kyslíka je mimo stanoveného rozsahu.

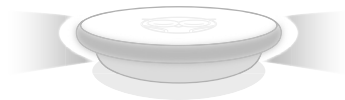

### Bliká modro

Inteligentná ponožka Smart Sock je odpojená zo základne.

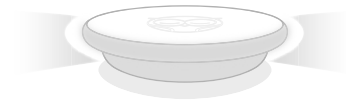

### Bliká žltó

Inteligentná ponožka Smart Sock spadla z nožičky, je zle nasadená alebo posunutá.


# Začínáme

1

Pomocou MicroUSB konektora pripojte elektronickú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock k základni.

2

Základňu zapojte do zásuvky. Inteligentná ponožka Smart Sock sa začne nabíjať.

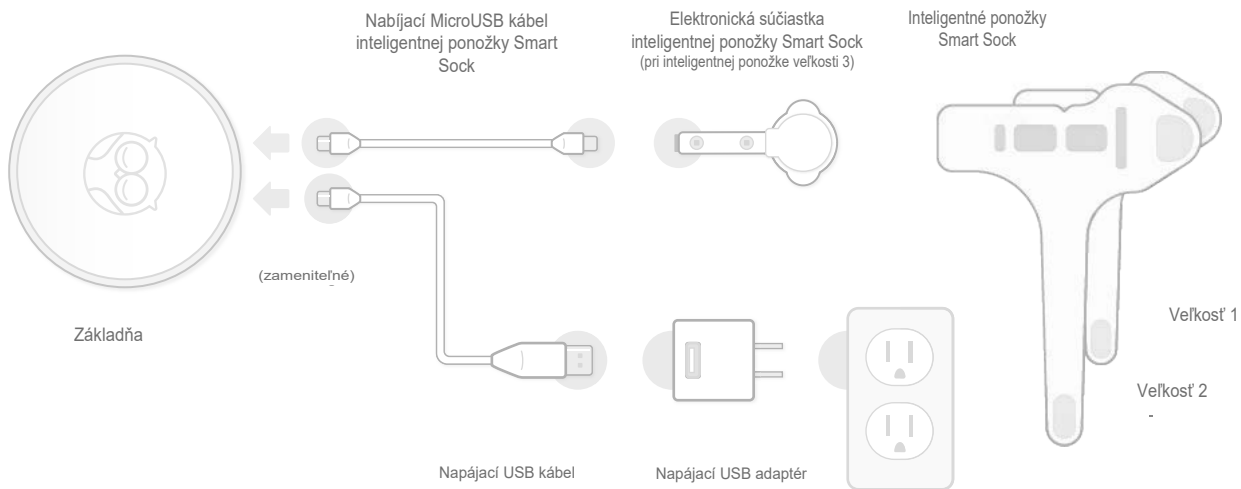


3

Stiahnite si aplikáciu Owlet a nastavte vašu inteligentnú ponožku Smart Sock TM a základňu.

4

Vďaka monitoru Owlet, ktorý vám pomôže postrážiť vaše bábätko, môžete opäť pokojne spať. Základňu používajte ako primárny oznamovací systém a aplikáciu ako sekundárny.

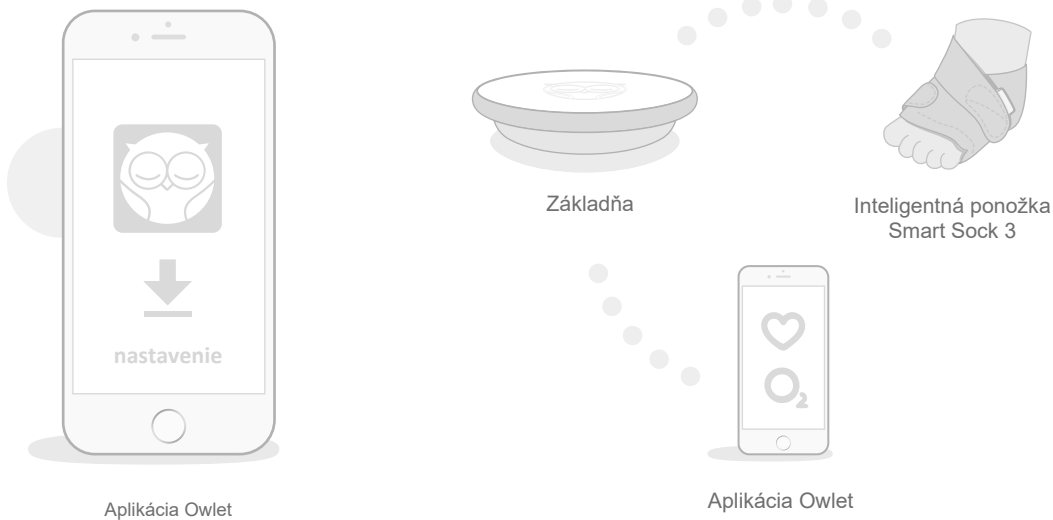

# Informácie záruke

Spoločnosť Owlet zaručuje, že inteligentná ponožka Smart Sock™ 3 od Owlet nebude pri bežnom používaní a údržbe vykazovať chyby materiálu ani spracovania po dobu (2) rokov od dátumu nákupu, ktorý je uvedený na doklade o nákupe.

**Inteligentná ponožka Smart Sock od Owlet a aplikácia Owlet majú slúžiť ako pomôcky pri starostlivosti o dieťa a nie sú určené na to, aby nahradili dohľad alebo sa používali bez dohľadu zodpovednej dospelé osoby.**

Inteligentná ponožka Smart Sock 3 od Owlet je určená pre zdravé deti, preto prahové hodnoty pre spustenie alarmu na inteligentnej ponožke Smart Sock 3 od Owlet nie sú také prísne ako u lekárskeho monitorov.

Upozornenie:

- Inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet nepoužívajte ako diagnostický nástroj.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky pulzový oxymeter.
- Nepoužívajte inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet, ak vám lekár odporučil používať lekársky monitor dychu.
- Inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet nepoužívajte ako výhovorku pri nebezpečných spánkových návykoch.

## PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE

V návode na používanie nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a starať sa o inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet. Riešenie niektorých problémov nájdete v sekcii Riešenie problémov. Ak si najprv prečítate tipy na riešenie problémov, možno sa na nás nebudete musieť obrátiť so žiadosťou o pomoc. Kompletné informácie o nastavení a používaní výrobku nájdete na webovej stránke [www.owletcare.sk](http://www.owletcare.sk).

## PREČÍTAJTE SI BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Vaša bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb je pre nás veľmi dôležitá. V tomto návode a v aplikácii Owlet Baby Care nájdete mnoho dôležitých bezpečnostných pokynov. Vždy si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a dodržujte ich.



**Tento symbol v tomto návode na používanie upozorňuje na dôležité bezpečnostné informácie!**

Všetky bezpečnostné informácie budú nasledované výstražným symbolom a slovom „NEBEZPEČENSTVO“, „VAROVANIE“, „POZOR“ alebo „UPOZORNENIE“. Tieto slová znamenajú:

**NEBEZPEČENSTVO** = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

**VAROVANIE** = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

**POZOR** = Bezprostredne hroziaca nebezpečná situácia, ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie osôb.

**UPOZORNENIE** = Nebezpečná situácia, ktorá by mohla viesť k iným následkom ako zraneniu osôb, napr. k poškodeniu majetku.



## VAROVANIE A DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

### VAROVANIE: Inteligentná ponožka Smart Sock 3 nie je zdravotnícka pomôcka.



Ponožka Smart Sock 3 od Owlet vás upozorní, ak pulzová frekvencia alebo hladina kyslíka v krvi dieťaťa sú mimo stanoveného rozsahu. Ponožka Smart Sock 3 je určená pre novorodencov do osemnásť (18) mesiacov, nie pre deti staršie ako osemnásť (18) mesiacov. Inteligentná ponožka Smart Sock 3 od Owlet nie je zdravotnícka pomôcka. Inteligentná ponožka Smart Sock 3:

- Nie je určená na diagnostiku, liečbu, zmiernenie, monitorovanie, liečenie ani predchádzanie žiadnej choroby ani zranenia.
- Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela.
- Primárne určený účel nedosahuje pôsobením chemických látok.
- Nezabraňuje syndrómu náhleho úmrtia novorodencov (SNÚK).

Primárnym účelom tohto návodu na používanie je: Používateľovi poskytnúť základné pokyny a rady pre správnu inštaláciu a používanie inteligentnej ponožky Smart Sock 3 od Owlet a vysvetliť funkcie, obsluhu, bezpečnostné opatrenia, údržbu a riešenie problémov s inteligentnou ponožkou Smart Sock 3 od Owlet. Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré majú túto inteligentnú ponožku Smart Sock 3 používať alebo nastavovať, si pozorne prečítali návod na používanie, aby pochopili, ako inteligentnú ponožku Smart Sock 3 od Owlet správne používať, a aby tieto pokyny dodržiavali.

Ak týmto pokynom nerozumiete, ihneď nás kontaktujte na e-mailovej adrese:  
info@owlet-care.sk

### PRE BEZPEČNOSŤ VÁS A VÁŠHO DIEŤAŤA



- ZÁKLADNÚ VŽDY UDRŽUJTE VO VZDIALENOSTI ASPOŇ 1 METRA OD DETSKEJ POSTIEĽKY, LEBO KÁBEL MÔŽE ZNAMENAŤ NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA.
- INTELIGENTNÁ PONOŽKA SMART SOCK 3 OD OWLET JE IBA POMÔCKOU. NENAHRÁDZA DOHLED DOSPELEJ OSOBY.
- U PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ, DETÍ NA PODPORNOM KYSLÍKU A DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM KONZULTUJTE POUŽITIE INTELIGENTNEJ PONOŽKY SMART SOCK 3 OD OWLET S VAŠIM LEKÁROM.
- VŽDY, KÉD SA OZVE ALARM, IHNEĎ ZAREAGUJTE.

### VYHLÁSENIE O ZHODE S FCC



Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré výslovne neschválila strana zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia. Používajte IBA dodaný napájací adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu našej obmedzenej záruky. Toto zariadenie sa testovalo a považuje sa za vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej budove. Toto zariadenie generuje, vysiela a môže vyzarovať vysokofrekvenčnú energiu, a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi výrobcu, môže rušiť rádiovú komunikáciu.



Toto zariadenie vyhovuje bezlicenčným kanadským RSS bez výnimiek pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj. Používanie zariadenia podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať každé rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť zariadenia.

### Reklama a servis

Certus Mercatus s.r.o.  
K Žižkovu 282/9  
190 00 Praha 9

### Informácie

email: info@irobot.cz  
telefón: +420 245 001 740

### Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7.30 - 15.30

# Riešenie problémov

Základné nastavenia | Alarmy | Pripojenie

## Základné nastavenia

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Pri nastavení nevidím Wi-Fi sieť inteligentnej ponožky Smart Sock 3.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základňa nie je zapnutá.</li><li>■ Základňa je už pripojená k Wi-Fi sieti inteligentnej ponožky Smart Sock 3.</li><li>■ Základňa je mimo dosahu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základňu zapojte do zásuvky.</li><li>■ Skontrolujte, či kontrolka Wi-Fi siete na spodnej strane základne svieti. Ak áno, tento krok preskočte a pokračujte v založení vášho účtu v aplikácii.</li><li>■ Základňu umiestnite bližšie k Wi-Fi routeru.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ V aplikácii Owlet nevidím našu domácu Wi-Fi sieť.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Váš router využíva frekvenčné pásmo 5 GHz (výrobok Owlet podporuje iba 2,4GHz pásmo).</li><li>■ Možno máte skrytý router.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Skontrolujte, či zariadenie iOS je pripojené k 2,4GHz sieti (väčšina 5GHz routerov podporuje 2,4GHz sieť).</li><li>■ Pokyny pre skryté routery nájdete na <a href="http://owletcare.com/support">owletcare.com/support</a>.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základňu nejde pripojiť k domácej Wi-Fi sieti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nesprávne heslo</li><li>■ Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routeru.</li><li>■ Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Skontrolujte heslo k vašej sieti.</li><li>■ Pred nastavením umiestnite základňu bližšie k routeru a po dokončení nastavenia základňu odnesť späť do detskej izby.</li><li>■ Skúste reštartovať telefón a znova sa pripojiť k Wi-Fi sieti.</li><li>■ Resetujte váš Wi-Fi router.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základňa po odpojení inteligentnej ponožky Smart Sock svieti bielo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Prebieha aktualizácia softvéru.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Inteligentnú ponožku Smart Sock opäť pripojte k základni, dokým aktualizácia nebude dokončená.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základňa nejde spárovať s mojím účtom Owlet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Základňa a vaše zariadenie iOS nie sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.</li><li>■ Podržanie malého tlačidla „Registrácia“</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Overte, či základňa a vaše zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti.</li><li>■ Stlačte a uvoľnite (nedržte) malé tlačidlo „Registrácia“ na spodnej strane základne a zopár sekúnd počkajte, než sa znova pokúsite spárovať váš účet Owlet.</li><li>■ Vaše zariadenie iOS pripojte k rovnakej 2,4GHz Wi-Fi sieti, ku ktorej je pripojená základňa.</li></ul>

\*Potrebujete technickú podporu? Kontaktujte nás na e-mailovej adrese [info@owlet-care.sk](mailto:info@owlet-care.sk)

## Alarmy

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> <li>Základňa bliká modro a pípa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Základňa je mimo dosahu inteligentnej ponožky Smart Sock.</li> <li>Telo rodiča alebo inej osoby starajúcej sa o bábätko blokuje spojenie medzi inteligentnou ponožkou Smart Sock a základňou. To sa bežne stáva pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod.</li> <li>Slabá alebo vybitá batéria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Základňu umiestnite bližšie k inteligentnej ponožke Smart Sock.</li> <li>Zmeňte polohu bábätka alebo zväžte, či pri kŕmení, výmene plienok, maznaní a pod. nevypnúte monitorovanie.</li> <li>Nabite inteligentnú ponožku Smart Sock.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Základňa bliká červeno a pípa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nízka alebo vysoká pulzová frekvencia</li> <li>Nízka hladina kyslíka</li> <li>Inteligentná ponožka Smart Sock nesedi na nožičke.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za malíčkom.</li> <li>Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje. Môže sa zbytočne spustiť alarm.)</li> <li>Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky.</li> <li>Zväžte, či nepoužívate inú veľkosť látkovej ponožky.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Základňa bliká žltá a pípa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Problémy so získavaním údajov</li> <li>Inteligentná ponožka Smart Sock nie je správne nasadená.</li> <li>Svetlo v miestnosti je príliš jasné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubezpečte sa, že obrys senzora na vonkajšej strane chodidla bábätka je 1-2 mm za malíčkom.</li> <li>Ubezpečte sa, že inteligentná ponožka Smart Sock prilieha k nožičke (ak nie, inteligentná ponožka ťažko získava údaje a môže sa zbytočne spustiť alarm).</li> <li>Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v okienkach látkovej ponožky.</li> <li>Stimte svetlo v miestnosti.</li> </ul>

## Pripojenie

Problém	Príčiny	Riešenie
<ul style="list-style-type: none"> <li>Základňa nie je pripojená k internetu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Základňa je mimo dosahu Wi-Fi routera.</li> <li>Vaša domáca Wi-Fi sieť nefunguje.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Základňu a Wi-Fi router umiestnite bližšie k sebe (zosilňovače Wi-Fi ani ďalšie routery problém nevyriešia).</li> <li>Resetujte váš Wi-Fi router.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inteligentná ponožka Smart Sock sa nenabíja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inteligentná ponožka Smart Sock nie je úplne zapojená.</li> <li>Inteligentná ponožka Smart Sock vyžaduje resetovanie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nechajte inteligentnú ponožku Smart Sock nabíjať, dokým sa neozve cvaknutie a nezačne zeleno blikať.</li> <li>Vypnite a znova zapnite elektronickú súčiastku inteligentnej ponožky Smart Sock.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Namiesto údajov o pulzovej frekvencii a hladine kyslíka vidno pomlčky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inteligentná ponožka Smart Sock sa snaží získať spofahlivé údaje.</li> <li>Bábätko príliš pohybuje nožičkou.</li> <li>Nesprávne nasadená inteligentná ponožka Smart Sock</li> <li>Zle padnúca látková ponožka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ubezpečte sa, že senzory sú zarovnané v strede okienok látkovej ponožky.</li> <li>Dieťa nedávajte do kolísky ani na vibračnú podložku, mohlo by sa narušiť správne fungovanie zariadenia.</li> <li>Skontrolujte, či je inteligentná ponožka Smart Sock správne nasadená.</li> <li>Skontrolujte, či ste použili vhodnú veľkosť látkovej ponožky.</li> </ul>

# Tipy pre zdravé prostredie počas spánku

Radi by sme sa s vami podelili o niekoľko tipov, ako bábätku zaistiť zdravý a bezpečný spánok.

- Bábätko by malo byť v postielke samo a ležať na chrbte. Spanie na boku alebo na brušku nie je pre bábätko bezpečné.
- Pre bábätko kúpte postielku, ktorá spĺňa platné bezpečnostné normy. Kúpte aj pevný matrac, ktorý do postielky dobre pasuje a oblečte ho do dobre priliehajúcej posteľnej bielizne.
- Do postielky neumiestňujte žiadne mäkké, voľne ležiace alebo čechraním prevzdušnené predmety. To znamená vankúše, deky, prikrývky, ochranné obloženie do detskej postielky, plyšáky, hračky a všetky mäkké predmety.
- Namiesto klasickej prikrývky použite dojčenskú prikrývku, ktorá sa dá zapnúť ako odev, alebo podobnú prikrývku, ktorá bábätko udrží v teple a bezpečí.
- S bábätkom zdieľajte izbu, ale nie posteľ! Bábätko by malo spať v samostatnej postielke blízko vašej postele. Bude tak v bezpečí a kŕmenie bude jednoduchšie. Keby bábätko spalo s vami, inteligentná ponožka Smart Sock nebude správne fungovať. Vaše telo by totiž rušilo bezdrôtový signál ponožky.
- Dbajte, aby ste s bábätkom nezaspali vo vašej posteli, na pohovke alebo v kresle.
- Nikdy nenechávajte bábätko spať na mäkkom povrchu, napr. v posteli pre dospelých alebo pre deti, na pohovke, v kresle, na vodnej posteli, vankúši, vankúšiku, prikrývke, ovčom rúne a podobných predmetoch.
- Nepoužívajte vankúše, polohovacie klíny ani fixačné podložky na podopretie bábätka, udržanie bábätka na chrbte alebo aby ste mu zabránili v otočení.
- Dbajte, aby sa bábätko nadmerno nezahrialo. Bábätku obliekajte ľahké pyžamko a v miestnosti udržiajte teplotu, ktorá je príjemná pre ľahko oblečeného dospelého.
- Zvážte, či bábätku počas odpoľudňajšieho a večerného spánku nedáte cumlík. Dojčatám cumlík dávajte až vo veku 3-4 týždňov, až si zvyknú na dojčenie.
- O týchto zásadách bezpečného spánku poučte všetkých, ktorí sa budú o bábätko starať!



